

Byte av infusionsset och ampull


Tillbehör du behöver:



Pump




Ampull

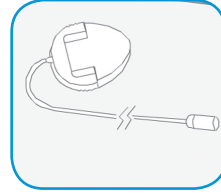

Infusionsset




Insulin

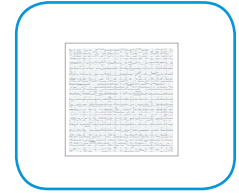

Hudservett

Komma igång. Tvätta händerna. Kontrollera sedan blodsockret.*

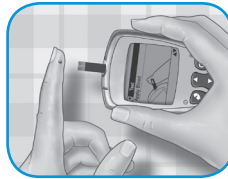

Gör så här för att fylla ampullen

- Sätt ihop en spruta:
 - Skruva på nålen.
 - Anslut det blå handtaget till ampullen och skjut sedan kolven fram och tillbaka 2 eller 3 gånger.
- Fyll ampullen med insulin:
 - Dra långsamt tillbaka på det blå handtaget.
 - Fyll med insulin för 2 eller 3 dagar:
___ enheter + ___ enheter för priming = ___ totala enheter
- Avlägsna luftbubblor:
 - Knacka på ampullen för att föra bubblorna till ytan.
 - Tryck det blå handtaget framåt så att bubblorna sakta förs in i insulinflaskan.
 - Ta bort flaskan, sätt tillbaka skyddet på nålen.
- Skruva av nålen från ampullen och sätt på det lilla, genomskinliga skyddet. Ta bort det blå handtaget. Sätt undan den fyllda ampullen.

Litet, genomskinligt skydd

Nål


Ampull

Blått handtag



Infusionsset

- På det nya stickstället, torka huden med desinfektionsmedel såsom rekommenderas av din vårdgivare. Låt torka.
- För in infusionssetet. Följ instruktionerna för infusionssetet.
- Sätt undan slangen. **Se till att slangen INTE är ansluten till stickstället.**

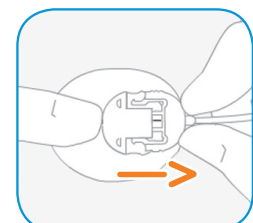

*Följ anvisningarna som medföljde mätaren.

Anslut slangen till ampullen


1. Ta bort det svarta ampullocket från pumpen.
2. Skruva slangkopplingen genom den mindre änden på det svarta ampullocket.
3. Skruva loss det lilla, genomskinliga locket från ampullspetsen.
4. Skruva fast slangkopplingen på ampullen. Skruva fast för hand tills den sitter på plats, och dra sedan åt ytterligare en kvarts varv.
5. Sätt undan slangen.



Svart ampullock

PRIMING

Se till att slangen INTE är ansluten till infusionsstället vid priming.

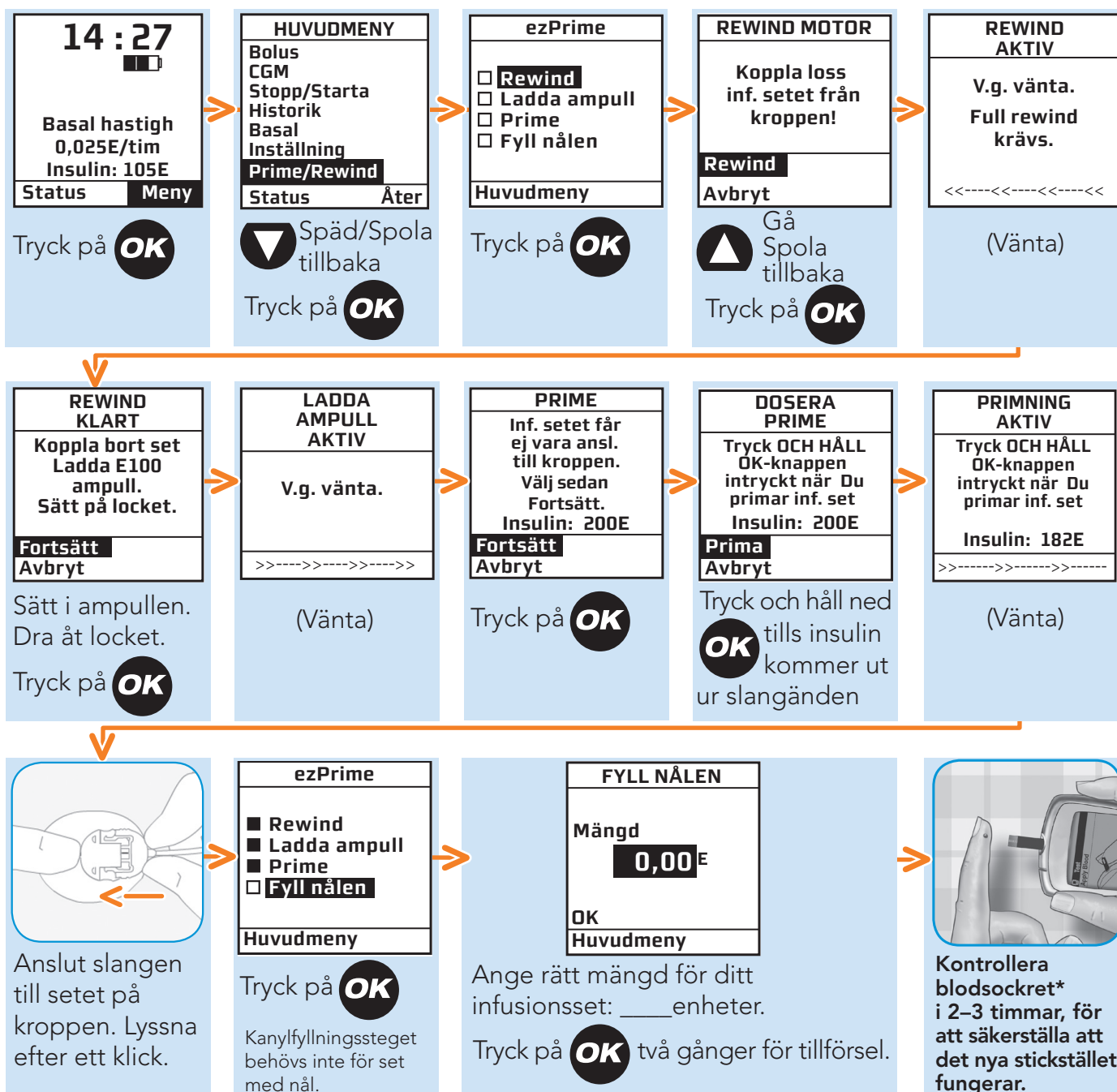

VIKTIGT: Dessa instruktioner är förenklade för att komplettera utbildningen du får av din sjukvårdspersonal. Läs användarhandboken och eventuella bipacksedlar som medföljde Animas® Vibe™ insulinpumpen.

*Följ anvisningarna som medföljde mätaren.