

diasend® Transmitter -laitteen merkkivalot



ok - vihreä merkkivalo

- Hidas vilkkuminen
ok-merkkivalo vilkkuu hitaasti, kun Transmitter-laitte hakee yhteyttä GSM-verkkoon.
- Nopea vilkkuminen
Transmitter-laitetta päivitetään. ok -merkkivalo vilkkuu nopeasti tietyn aikaa. Voit aloittaa Transmitter-laitteen käytön, kun sininen send -merkkivalo vilkkuu jälleen hitaasti.
- Pysyvä valo
Merkkivalo osoittaa onnistunutta latausta.

send - sininen merkkivalo

- Hidas vilkkuminen
Transmitter-laite on käyttövalmis.
- Nopea vilkkuminen
Tietoja ladataan.

error - punainen merkkivalo

- Pysyvä valo
Merkkivalo osoittaa, että viimeisin lataus ei onnistunut. Tämä johtuu todennäköisimmin langattomaan GSM-verkkoon liittyvistä väliaikaisista syistä. Yritä ladata potilaslaite uudelleen.
- Nopea vilkkuminen
Merkkivalo vilkkuu ok-merkkivalon ohella, jos Transmitter-laite ei löydä verkkoa. Huomaa, että voit tarkastaa signaalin voimakkuuden ja laadun tilisi kohdasta Tilinhallinta.

diasend® on tarkoitettu yksityishenkilöiden tai terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön joko kotona tai terveydenhuollon yksikössä käytettäväksi tietojen siirtoon kotikäyttöisestä valvontalaitteesta, kuten glukosimittarista tai insuliinipumpusta, palvelimen tietokantaan diabeteksen hallinnan helpottamiseksi. Laite on tarkoitettu ammattikäyttöön ja käsikauppaan.

1 Kytke Transmitter-laite pistorasiaan

Kytke Transmitter-laite verkkovirtaan mukana toimitetulla virtajohdolla. Vihreä ok-merkkivalo vilkkuu hitaasti. Transmitter-laite on käyttövalmis, kun sininen send-merkkivalo vilkkuu hitaasti.

Huomaa: Jos olet yhdistänyt Transmitter-laitteeseen USB-keskittimen, huomaa, että USB-keskittimen on saatava virta omasta virtalähteestään.



2 Liitä potilaslaite Transmitter-laitteeseen

Kukin potilaslaite voidaan kytkeä yhdellä kolmesta tavasta:

- USB-kaapeli (USB-portti tai USB-keskitin)
- Bluetooth (vaatii erityisen Bluetooth-laitteen)
- Infrapuna (sisäänrakennettu IR-vastaanotin)



Tämän pikaoppaan sivuilla 3 ja 4 on kaikkien yhteensopivien potilaslaitteiden latausohjeet.



3 Siirrä tiedot

- a. Liitä potilaslaite - sininen **send**-merkkivalo vilkkuu nopeasti tietojen lataamisen aikana.
- b. Odota, kunnes sininen **send**-merkkivalo lakkaa vilkkumasta nopeasti ja vihreä **ok** -merkkivalo syttyy. Jos punainen **error**-merkkivalo syttyy, yritä uudelleen. *Jos ongelma toistuu, ota yhteys Diasend-tukeen.*

4 Kirjaudu diasend®-tilillesi

Siirry osoitteeseen www.diasend.com, kirjaudu diasend®-tilille ja hae ladatut tiedot.

5 Potilasprofiilin luominen ja potilaslaitteiden tallentaminen

Jos haluat tarkastella tietoja luomatta potilasprofiilia, valitse vastaava lataus Klinikka-välilehdeltä ja napsauta Näytä valitut yksiköt.

Huomaa: Kaikki lataukset poistetaan Klinikka-näkymästä saman päivän keskiyön jälkeen, mutta mitään tietoja ei poisteta.

Potilasprofiili voidaan luoda kahdella tavalla.

a. Klinikka-välilehdellä



Valitse äskettäin ladatut potilaslaitteet valitsemalla niiden viereinen valintaruutu ja napsauta Luo potilasprofiili valituille laitteille.

b. Potilaat-välilehdellä

Valitse Uusi potilas.



6 Tietonäyttö



Tiedot näytetään viidellä välilehdellä, joilla voit tarkastella glukoosi-, CGM- ja insuliinitietoja..

- c. Kun vihreä **ok**-merkkivalo syttyy, voit kirjautua sisään ja tarkastella tietoja osoitteessa www.diasend.com tai ladata lisää potilaslaitteita. Jos olet jo kirjautuneena, napsauta Lataa sivu uudelleen . Huomaa, että diasend® on pilvipohjainen ja voit tarkastella lataamiasi tietoja koska tahansa.

Etu- ja sukunimet ovat pakollisia kenttiä. Lisäasetuksia on kohdassa Pura rekisteröintikaavake.

Suosittellemme rekisteröimään laitteet latauksen jälkeen Klinikka-välilehdellä, jotta vältetään potilaslaitteen sarjanumeron manuaaliselta rekisteröinniltä .

Kirjautumistiedot

Sallii potilaan kirjautumisen diasend®-järjestelmään ja raporttien katselun.

Jotta potilaat voisivat tarkastella tietojaan kotona, valitse valintaruutu Sallii potilaan kirjautumisen diasend®-järjestelmään ja raporttien katselun.

- Jos teet tämän tilin rekisteröintiprosessin aikana, sinun on luotava potilaalle käyttäjätunnus ja salasana.
- Jos kuitenkin valitset valintaruudun sen jälkeen, kun olet luonut potilastilin, huomaat, että diasend® on luonut sinulle käyttäjätunnuksen. Tässä tapauksessa sinun on luotava ainoastaan salasana.

Huomaa: Potilasprofiileja voidaan muokata koska tahansa.

Katso lisätietoja raporteistamme verkkosivullamme olevasta oppaasta diasend® Report reference guide.

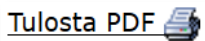

7 Tietojen jakaminen

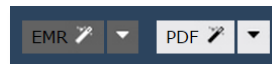
Potilaat, joilla on diasend® Personal , lataavat potilaslaitteensa kotona ja he voivat jakaa lataamansa tiedot korkeintaan kahden eri terveydenhoito-organisaation kanssa. Jotta potilaat voivat jakaa

tietonsa kanssasi, he tarvitsevat yksilöllisen diasend®-tunnukseksi, jota kutsutaan nimellä HCP-tilin ID. Löydät sen kohdasta Tilinhallinta -> Potilaslinkit.

8 Raporttien luominen ja PDF-tiedostojen tulostaminen

Raportti voidaan luoda kahdella tapaa.

 Tulosta PDF 



- a. Voit luoda raportin nykyisestä näkymästä välittömästi napsauttamalla Tulosta PDF -painiketta.

- b. Vaihtoehtoisesti voit luoda raportin, joka sisältää ennalta-asetetut muuttujat, napsauttamalla PDF-velho -painiketta. Voit säätää työkalua kohdassa Settings.

Tiettyjen potilaslaitteiden lataaminen

Huomaa, että joitakin seuraavista potilaslaitteista ei välttämättä ole saatavilla omalla markkina-alueellasi.

USB-glukoosimittarit ja CGM:t

Seuraavassa luetellaan kaikki yhteensopivat mittarit, jotka voidaan liittää Transmitter-laitteeseen / USB-keskitin USB-kaapelilla tai Bluetoothilla.



Ellei mittarin kohdalla anneta erityisiä latausohjeita, liitä se Transmitter-laitteeseen erityisellä latauskaapelilla, jolloin lataus käynnistyy automaattisesti.

Abbott - FreeStyle, FreeStyle Flash, FreeStyle Freedom, FreeStyle Freedom Lite, FreeStyle Lite, Freestyle Mini, FreeStyle Optium, FreeStyle Optium H, FreeStyle Papillon, FreeStyle Papillon Lite, FreeStyle Papillon Mini, FreeStyle Papillon Vision, FreeStyle Precision, FreeStyle Precision H, FreeStyle Xido, Optium Mini, Optium Xceed, Optium Xido, Precision Xceed, Precision Xtra

HUOMAA: Irrota mittari latauksen jälkeen ja odota vähintään 15 sekuntia ennen toisen Freestyle-mittarin liittämistä.



FreeStyle Navigator

Mene mittarin kohtaan Menu -> System -> Upload. Valitse ja vahvista lähetyksen aktivoimiseksi.

Huomioi, että diasend®-järjestelmäsi on oltava varustettu Bluetooth-sovittimella.



FreeStyle Navigator II

Varmista, että mittari on sammutettu tai paina päävalikossa Home.



FreeStyle Libre, FreeStyle Insulinx, FreeStyle Papillon InsuLinX, FreeStyle Optium Neo

Acon Laboratories - On Call® Resolve, On Call®

Advanced Käynnistä tiedonsiirtotila liittämällä ja painamalla mittarin M- ja S-painikkeita.

On Call® Plus

Liitä ja käynnistä sitten tiedonsiirtotila pitämällä mittarin S-painiketta painettuna.

On Call® Vivid

AgaMatrix - WaveSense Jazz™

Arkray GlucoCard® - X-meter, X-mini plus

Bayer - Breeze®2

Liitä ja paina mittarin virtapainiketta.

Contour®, Contour® Link, Contour® XT

Liitä ja paina mittarin M-painiketta.

Contour® Next USB, Contour® USB, Contour® Next Link

Liitä erityisellä siirtojohdolla tai suoraan Transmitter-laitteeseen.



Contour® Next

B. Braun



Omnitest 5

Cambridge Sensors - Microdot+

Dexcom - SEVEN PLUS



G4 Platinum

Jos lataus ei käynnisty, irrota mittari ja sammuta se

valitsemalla "Sammuttaminen" mittarin valikosta.

Käynnistä sitten mittari uudelleen ja liitä se

Transmitter-laitteeseen.

Everymed



EveryX3

Liitä ja paina mittarin OK-painiketta.

FORA



Diamond Prima



Diamond MINI

Huomaa: Tuettu versio on se, jossa on integroitu Bluetooth. Huomioi, että diasend®-järjestelmäsi on oltava varustettu Bluetooth-sovittimella.
Ota Bluetooth käyttöön kytkemällä mittari päälle sen virtapainiketta painamalla. Sammuta sitten mittari painamalla sen virtapainiketta. LED-merkkivalo mittarin oikeassa alakulmassa vilkkuu sinisenä sen merkiksi, että Bluetooth on aktivoitu. Valo muuttuu kiinteästi palavaksi, kun dataa ladataan.

GlucorX - Nexus Voice



Nexus, Nexus Mini

infopia - Element, GluNEO, GlucoLab

i-SENS - CareSens N, CareSens N POP, Caresens COOL/Bravo, Caresens N Voice



Liitä ja paina mittarin S-painiketta.
alphacheck professional
Liitä ja paina mittarin S-painiketta.

LifeScan - OneTouch® UltraSmart®



Liitä ja paina mitä tahansa painiketta.
OneTouch® Vita™, Ultra®, Ultra 2®, Verio® (vanha malli), UltraEasy®/UltraMini®, Select® One Touch® Verio® Pro, Verio® IQ, Verio® Sync One Touch® Ping



Liitä ja paina mittarin virtapainiketta.



OneTouch® Select® Plus, Verio®, Verio® Flex

Medcore - GlucoSure Extra, GlucoSure Max, Medcore Care

Liitä ja paina mittarin virtapainiketta.

Menarini - GlucoMen® Visio, GlucoMen® READY

Liitä ja paina mittarin virtapainiketta.
GlucoMen® areo, GLUCOFIX Premium, GLUCOFIX iD, GLUCOFIX miò, GLUCOFIX miò Plus, Gm, G+, LX, LX Plus
GLUCOCARD™ MX
Jos mittarin näyttöön ilmestyy "E-3", kytke mittari irti ja odota, että näyttö sammuu. Kytke mittari sitten takaisin.

Mendor - Discreet

Liitä ja paina mittarin virtapainiketta.

Nipro - TRUE METRIX®, TRUE METRIX® AIR, TRUEresult®, TRUEyou®, TRUEyou mini

Aseta oikea USB-kaapeli Transmitter-laitteeseen / USB-keskittimeen ja mittari sopivaan Docking Station-asemaan.

Nova - Max® Link, Max Plus®

Prodigy



AutoCode



Roche - Accu-Chek® Active (USB)



Accu-Chek® Mobile (USB)

Sanofi - BGStar®, MyStar Extra™

Terumo - Finetouch®

Wellion - Calla Dialog

Liitä ja valitse PC Link mittarin päävalikosta.
Linus, Calla Light, Calla Premium.

Ypsomed - mylife Pura



mylife™ Unio™

Infrapuna-glukoosimittarit (IR)

Aseta mittari lataustilaan seuraamalla alla olevia ohjeita.
Aseta glukoosimittarin yläpää kohti Transmitter-laitteen infrapunasilmää, joka on etupaneelin keskikohdassa (sanojen "error" ja "diasend[®]" välissä).

Roche - Accu-Chek® Compact

Aktivoi IR-siirto pitämällä painettuna mittarin kahta ylintä painiketta, kunnes kaksi nuolta tulee näyttöön.

Accu-Chek® Aviva, Aviva Nano, Performa

Aktivoi IR-siirto pitämällä painettuna mittarin kahta nuolipainiketta, kunnes kaksi nuolta tulee näyttöön.

Accu-Chek® Compact Plus

Aktivoi IR-siirto pitämällä painettuna mittarin S- ja M-painikkeita näytön alapuolella, kunnes kaksi nuolta tulee näyttöön.

Accu-Chek® Aviva Combo, Aviva Expert

Siirry mittarin päävalikossa kohtaan My data ja valitse Data transfer.

Accu-Chek® Mobile (IR)

Pitä painettuna mittarin kahta nuolipainiketta. Valitse Data transfer -valikossa ensimmäinen vaihtoehto ("for analysis"). Jos Mobile-mobiilimittarin sarjanumero alkaa merkeillä U1, katso Accu-Chek Mobile USB:n ohjeiden sivua 4.

Muista, ettet lataa näitä mittareita diasend®-laitteelle Smart Pixillä.

Insuliinipumput

Animas® 1200/2020/Ping/Vibe

1. Keskeytä pumpun toiminta. (Siirry päävalikossa kohtaan Suspd/Resum ja paina OK; Suspend on korostettuna).
2. Paina OK.
3. Aseta pumppu sen takaosa kohden diasend® Transmitter -laitteen etupaneelin keskiosaa.
4. Kun siirto on suoritettu, jatka pumpun toimintaa. (Siirry päävalikossa kohtaan Suspd/Resum ja paina OK; Resume on korostettuna). Paina OK.

Varmista, että pumpun näyttö on valaistu, kun siirto alkaa.

Deltec CoZmo® 1700

1. Aktivoi pumppu painamalla nuoli alas -painiketta.
2. Aseta pumppu sen takaosa kohden diasend® Transmitter -laitteen etupaneelin keskiosaa. Huomaa: CoZmo-insuliinipumpun akun on oltava hyvin ladattu, jotta siirto voidaan suorittaa onnistuneesti.

Asante Snap

1. Varmista, että kyltissä on vihreä Asante-logo. Jos vihreää Asante-logoa ei ole, ohjausyksikkö ei pysty kommunikoiamaan AsanteSyncin kanssa.
2. Kun Snap Controller on yhä liitettynä Pump Body -runkoon, varmista, että Snap-järjestelmässä on riittävästi virtaa tiedonsiirtoon. Jos aloitusruutuun ilmestyy hälytys ALERT, määritä sen syy painamalla kohtaa STATUS. Jos hälytyksen syynä on matala virta, vaihda Pump Body.
3. Irrota Snap Pump Controller Pump Body -rungosta.
4. Pumpun näyttöön ilmestyy "!!ALARM!!". Hiljennä hälytys painamalla SILENCE. Tyhjennä sitten hälytysviesti painamalla OK.
5. Liitä ohjausyksikkö AsanteSynciin.
6. Liitä AsanteSync Transmitter-laitteeseen erityisellä johdolla.

Roche Accu-Chek®:



Insight

(Käytä Roche Accu-Chek® Smart Pix 2)

Huomaa, tietoja ladataan mittarista.

1. Liitä Smart Pix Transmitter -lähettimeen ja odota, että Smart Pix sininen merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti.
2. Liitä mittari Smart Pix.
3. Valitse mittarin valikosta "Connect to PC" ja paina mittarin OK-painiketta.
4. Varmista, että pumppu on mittarin lähellä.
5. Smart Pix sininen merkkivalo palaa, kun tietoa lähetetään laitteesta Smart Pix.
6. Sininen merkkivalo sammuu itseksensä ja sekä Smart Pix että laite antavat äänimerkin sen merkiksi, että tietoja

- lähetetään Smart Pix Transmitter -lähettimeen. **Älä irrota Smart Pix -laitetta vielä tässä vaiheessa!**
7. Odota, että Transmitter antaa signaalin onnistuneesta lataamisesta (ok-merkkivalo palaa).

Spirit, Spirit Combo

(Käytä Roche Accu-Chek® Smart Pix)

Huomioi, että tähän tarvitaan Smart Pix -versio 3.02 tai uudempi!

1. Liitä Smart Pix Transmitter -lähettimeen ja odota, että Smart Pix sininen merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti.
2. Aseta pumppu PC link -toimintatilaan (sammuta pumppu ja siirry PC connection -valikkoon).
3. Aseta pumpun infrapunasilmä kohti Smart Pix. Sininen merkkivalo ilmaisee, että tietoja lähetetään Smart Pix.
4. Odota, että sininen merkkivalo alkaa vilkkua uudelleen hitaasti tai ei vilku lainkaan.
5. Tietoja lähetetään nyt Smart Pix Transmitter -lähettimeen **Älä irrota Smart Pix vielä tässä vaiheessa!**
6. Odota, että Transmitter antaa signaalin onnistuneesta lataamisesta (ok-merkkivalo palaa).

Huomaa, että jos Smart Pix jätetään kiinni Transmitter-laitteeseen tai USB-keskittimeen käytön jälkeen, seurauksena voi olla virheitä myöhemmissä siirroissa.



SOOIL DANA R

1. Valitse Main menu.
2. Siirry kohtaan Settings.
3. Valitse Discovery.
4. **send**-merkkivalon tulisi alkaa vilkkua nopeasti. Jos näin ei tapahdu ja pumppu sammuu itsestään, yritä uudestaan.
5. Odota, kunnes **send**-merkkivalo lakkaa vilkkumasta nopeasti ja **ok**-merkkivalo palaa.

Huomaa, että tarvitset siirtoa varten Bluetooth-USB-sovittimen, joka on liitetty diasend® Transmitter -laitteeseen.

Tandem



t:flex, t:slim

Ypsomed



mylife™ OmniPod®

Liitä Transmitter-laitteeseen. Älä irrota, ennen kuin Transmitter-laitteen sininen valo on lakannut vilkkumasta nopeasti.

Insuliinikynät



pendiq®

Varmista, että johto on kiinnitetty kunnolla. Insuliinikynän merkkivalo alkaa vilkkua ja lataus käynnistyy 10 - 15 sekunnin kuluessa.

diasend.com

Diasend AB
Datavägen 14A
SE-436 32 ASKIM
SWEDEN
Faksi: +46 (0) 31-315 38 86

Tuki

+46 (0)31-762 08 88
support@diasend.com
www.diasend.com