

Pikaopas

diasend® Personal

diasend.com

Easy Diabetes Communication

diasend® Personal on palvelu diabetespotilaille, jotka haluavat tarkkailla glukoosi-, CGM- ja insuliiniarvojaan kotona. Jotta voit ladata tietoja kotiseurantalaitteeltasi/-laitteiltasi, sinun on ensin rekisteröitävä tili ja ladattava diasend® Uploader -ohjelmisto.

1 Rekisteröidy osoitteessa diasend.com ja lataa ja asenna diasend® Uploader

- Suorita rekisteröintiprosessi loppuun verkossa.
- Lataa diasend® Uploader -ohjelman asennustiedosto rekisteröintiprosessin viimeisessä vaiheessa.
- Suorita asennustiedosto ja noudata näytölle tulevia ohjeita.



Yhteensopivat käyttöjärjestelmät:
Windows XP, Vista, 7, 8
Mac OS X 10.6-10.10 (Intel-pohjainen)

Huomaa: Potilaat, joilla on käytössä Mac OS X, voivat etsiä ladatun asennustiedoston Finderin avulla.

Huomaa: Pääset hakemaan Uploader -asennustiedoston myös tilisi avulla. Kirjaudu tilillesi ja mene kohtaan "Työkalut".

2 Käynnistä Uploader ja liitä laite tietokoneeseen

- Käynnistä ohjelma kaksoinapsauttamalla työpöydän Uploader -kuvaketta.
- Liitä asianmukainen USB-johto tai infrapunajohto (IR) tietokoneeseen, odota muutama sekunti, kunnes tietokone tunnistaa johtoajurit, ja liitä laite johtoon alla näkyvällä tavalla.


Katso lisätietoja kunkin laitteen lataamisesta tämän oppaan sivulta 2.

Huomaa: Kun siirrät laitetta ensimmäisen kerran, sinua pyydetään validoimaan käyttäjätilesi. Syötä käyttäjänimesi ja salasanasi.

Huomaa: Animas®-pumput ja Roche Accu-Chek® -mittarit vaativat langattoman Actisys IR -latausjohdon (ACT-IR224UN-Li). Animas-potilaat, joilla on käytössä Windows 8 -käyttöjärjestelmä, tarvitsevat erikoisjohdon (ACT-IR224UN-Li2). Accu-Chek® 360 USB-johto on yhteensopiva myös diasend® -järjestelmän kanssa, joka toimii Accu-Chek® -laitteissa. Kaikki muut laitteet vaativat niitä vastaavan USB-johdon.



USB-johdolla varustettu glukoosimittari

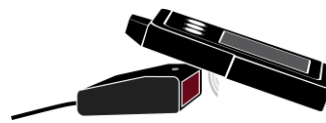

Infrapunajohdolla (IR) varustettu insuliinipumppu



Infrapunajohdolla (IR) varustettu glukoosimittari

3 Kirjaudu osoitteessa diasend.com ja tarkastele/jaa tietoja

Kaikki tietosi näkyvät helposti ymmärrettävissä taulukoissa ja grafiikoissa. Katso lisätietoja verkkosivullamme olevasta Report reference guide -oppaasta.

Voit jakaa tietojasi terveydenhuollon henkilökunnalle syöttämällä HCP-tilin ID:n diasendin® kohtiin "Tilinhallinta" ja "Jaa tiedot". Muista napsauttaa kohtaa "Päivitä".

The screenshot shows the diasend.com user interface. At the top, there are navigation tabs: "Tietojen tarkastelu" (selected), "Työkalut", "Tilinhallinta", and "Kirjaudu ulos". The main content area displays the user's name "John Doe" and two data rows. The first row is for "Glukoosi- ja/tai CGM-laitteen antama tieto" with dates "18/09/2013 - 27/02/2015". The second row is for "Insuliinipumpun antama tieto" with dates "01/01/2011 - 27/02/2015". Below the data, there are tabs for "Glukoosi", "CGM", "Insuliini", "Vertailu" (selected), and "Kooste". A "PDF" icon is visible on the right. At the bottom right, there is a button labeled "Omat tietoni".

Tässä luetellaan kaikki yhteensopivat laitteet. Ellei laitteen kohdalla anneta mitään erityisiä latausohjeita, liitä se PC/Mac-tietokoneeseen sen omalla USB-johdolla, jolloin lataus käynnistyy automaattisesti. Osoitteessa diasend.com näet voimassa olevan luettelon yhteensopivista laitteista ja tunnetuista rajoituksista.

Glukoosimittarit ja CGM:t

USB-johdolla varustetut glukoosimittarit ja CGM:t

Abbott - FreeStyle, FreeStyle Flash, FreeStyle Freedom, FreeStyle Freedom Lite, FreeStyle Lite, FreeStyle Mini, FreeStyle Optium, FreeStyle Optium H, FreeStyle Papillon, FreeStyle Papillon Lite, FreeStyle Papillon Mini, FreeStyle Papillon Vision, FreeStyle Precision, FreeStyle Precision H, FreeStyle Xido, Optium Mini, Optium Xceed, Optium Xido, Precision Xceed, Precision Xtra



Freestyle Navigator II



FreeStyle Libre, FreeStyle InsuLinx, FreeStyle Papillon InsuLinx, FreeStyle Optium Neo

Bayer - Contour, Breeze2

Liitä tietokoneeseen ja paina mittarin virtapainiketta.

Contour Next USB, Contour USB

Liitä suoraan tietokoneeseen.



Contour Next

Dexcom - SEVEN PLUS



G4 Platinum

i-SENS - CareSens N, CareSens N POP, CareSens COOL/Bravo



alphacheck professional

Liitä tietokoneeseen ja paina mittarin S-painiketta.

LifeScan - OneTouch® UltraSmart®

Liitä tietokoneeseen ja paina vasenta mustaa painiketta.

Ultra®, Ultra2®, UltraMini® / UltraEasy®, Verio® (gen 1),



Verio® Pro, Verio® IQ, VerioSync



OneTouch® Ping

Liitä ja paina mittarin virtapainiketta.

Medcore - Care

Menarini - GlucoMen LX Plus, Gm, areo

Nipro - TRUEresult, TRUEyou, TRUEyou mini

Prodigy



AutoCode®

Roche



Accu-Chek® Mobile (USB)

Jos siirto ei ala 20 sekunnin kuluessa kaapelin liittämisen jälkeen, mene mittarin päävalikkoon, mene kohtaan "My data", "PC analysis", "Reports" ja liitä mittari uudelleen USB-kaapeliin.

Älä pidä kahta nuolipainiketta painettuina.

Sanofi - BGStar®, MyStar Extra®

Ypsomed - mylife™ Pura



mylife™ Unio™

USB-infrapunajohdolla (IR) varustetut glukoosimittarit

Liitä erityinen langaton infrapunalatausjohto (ks. kuva tämän oppaan sivulla 1) ja sijoita glukoosimittari siten, että sen yläpää on suunnattu kohti johdon etupaneelia.

Roche - Accu-Chek® Aviva, Nano

Aktivoi IR-siirto painamalla ja pitämällä painettuna kahta nuolipainiketta, kunnes kaksi nuolta tulevat näyttöön.

Roche - Accu-Chek® Compact Plus

Aktivoi IR-siirto painamalla ja pitämällä painettuna S- ja M-painikkeita näytön alapuolella, kunnes kaksi nuolta tulee näkyviin näyttöön.

Roche - Accu-Chek® Aviva Combo, Aviva Expert

Mene päävalikossa kohtaan "My data" ja valitse "Data transfer".

Roche - Accu-Chek® Mobile (IR)

Pitä painettuna kahta nuolipainiketta. Valitse data transfer -valikossa ensimmäinen vaihtoehto ("for analysis").

Insuliinipumput

Animas® - 1200/1250/2020/Ping/Vibe

1. Keskeytä pumpun toiminta. (Siirry päävalikossa kohtaan "Suspnd/Resum" ja paina OK; "Suspend" on korostettuna).
2. Paina OK.
3. Sijoita pumppu siten, että sen takaosa on kohti langatonta Actisys IR -latausjohtoa.
4. Kun siirto on suoritettu: jatka pumpun toimintaa. (Siirry päävalikossa kohtaan "Suspnd/Resum" ja paina OK; "Resume" on korostettuna). Paina OK.

Asante - Snap

1. Varmista, että kyltissä on vihreä Asante-logo. Jos vihreää Asante-logoa ei ole, ohjausyksikkö ei pysty kommunikoimaan AsanteSync kanssa.
2. Kun Snap Controller on yhä liitetty Pump Body -runkoon, varmista, että Snap-järjestelmässä on riittävästi virtaa tiedonsiirtoon. Jos aloitusruutuun ilmestyy hälytys ALERT, määritä sen syy painamalla kohtaa STATUS. Jos hälytyksen syynä on matala virta, vaihda Pump Body.
3. Irrota Snap Pump Controller Pump Body -rungosta.
4. Pumpun näyttöön tulee !!ALARM!!. Hiljennä hälytys painamalla SILENCE. Tyhjennä sitten hälytysviesti painamalla OK.
5. Liitä ohjausyksikkö AsanteSynciin.
6. Liitä AsanteSync tietokoneeseen erikoisjohdolla.

Insulet



OmniPod®

Roche Accu-Chek®:



Insight

(Käytä Roche Accu-Chek® Smart Pix 2)

Huomaa, tietoja ladataan mittarista.

1. Liitä Smart Pix tietokoneeseen ja odota, että Smart Pix sininen merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti.
2. Liitä mittari ja Smart Pix.
3. Valitse mittarin valikossa "Connect to PC" ja paina mittarissa OK.
4. Varmista, että pumppu on mittarin lähellä.
5. Smart Pixin sininen merkkivalo palaa, kun tietoa lähetetään laitteesta Smart Pix.
6. Sininen merkkivalo sammuu itseksensä ja sekä Smart Pix että laite antavat äänimerkin sen merkiksi, että tietoja lähetetään Smart Pixistä Uploader -ohjelmistoon. *Älä irrota Smart Pix vielä tässä vaiheessa!*
7. Odota, että Uploader antaa signaalin onnistuneesta lataamisesta.

Spirit, Spirit Combo

(Käytä Roche Accu-Chek® Smart Pixiä)

Huomioi, että tähän tarvitaan Smart Pix -versio 3.02 tai uudempi.

1. Liitä Smart Pix tietokoneeseen ja odota, että Smart Pixin sininen merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti.
2. Aseta pumppu PC link -toimintatilaan (sammuta pumppu ja siirry PC connection -valikkoon).
3. Aseta pumpun infrapunasilmä kohti Smart Pixiä. Sininen merkkivalo ilmaisee, että tietoja lähetetään Smart Pixiin.
4. Odota, että sininen merkkivalo alkaa vilkkua uudelleen hitaasti tai ei vilku lainkaan.
5. Tietoja lähetetään nyt Smart Pixistä Uploader -ohjelmistoon. *Älä irrota Smart Pixiä vielä tässä vaiheessa!*
6. Odota, että Uploader antaa signaalin onnistuneesta lataamisesta.

Tandem



t:slim

Ypsomed



mylife™ OmniPod®

Muista: Liittäessäsi USB-johdon ensimmäistä kertaa tietokoneeseen odota muutamia sekunteja johtojurin tunnistusta varten ennen laitteen liittämistä johtoon.

VAROITUS!

Ota aina yhteys hoitavaan lääkäriisi, jos havaitset jotain epänormaalia diasendin® näyttämässä tiedoissa. Älä koskaan muuta lääkitysannostustasi sopimatta asiasta hoitavan lääkärisi kanssa! Kaikki lääketieteelliset diagnoosit ja hoito on suoritettava asianmukaisen terveydenhuollon ammattilaisen valvonnassa ja seurannassa! diasend® ei ole tarkoitettu tuottamaan automatisoituja hoitopäätöksiä tai käytettäväksi korvaamaan terveydenhuollon ammattilaisen harkintaa. diasend® ei ole tarkoitettu hätäpuheluihin tai minkään reaaliaikaisten hälytysten tai aikakriittisten tietojen siirtoon tai osoittamiseen! diasend® ei ole tarkoitettu korvaamaan suoraa lääketieteellistä valvontaa tai hätätapausten käsittelyä.

diasend.com

Diasend AB

Datavägen 14A

SE-436 32 ASKIM

SWEDEN

Faksi: +46 (0) 31-315 38 86

Tuki

+46 (0)31-762 08 88

support@diasend.com

www.diasend.com