

Onnittelut uudesta Animas® Vibe™ -insuliinipumpusta ja CGM-järjestelmästä. Tämän asiakirjan tarkoitus on avustaa sinua nykyisen Animas®-insuliinipumpun asetusten siirtämisessä uuteen Animas® Vibe™ -insuliinipumpuusi.

## Animas® -insuliinipumpun asetukset

### OSA A - NYKYISEN INSULIINIPUMPPUSI ASETUKSET

Syötä seuraavat tiedot nykyisestä Animas®-insuliinipumpustasi. Tämä varmistaa sen, että asetuksesi on kirjoitettu muistiin, mikä helpottaa Animas® Vibe™ -insuliinipumpun ohjelmointia. Nykyiset perusohjelma-asetukset avataan Animas® -insuliinipumpun valikoista Päämenu > Perus. Aktiivisena olevan perusohjelman vasemmalle puolelle ilmestyy "A".

Perusohjelma-asetukset							
Ohjelma 1		Ohjelma 2*		Ohjelma 3*		Ohjelma 4*	
Arkipäivä		Muu		Viikonloppu		Liikunta	
Kokonais U		Kokonais U		Kokonais U		Kokonais U	
Alku	U/h	Alku	U/h	Alku	U/h	Alku	U/h
00:00		00:00		00:00		00:00	

\* Perusmenussa voi olla 4 perusohjelmaa, jos aktivoit tämän ohjelman valinnoista Asetukset > Lisäasetus 2 (perusohjelmat).

**Jos tarvitset apua asetusten saamiseksi insuliinipumpustasi tai niiden ohjelmoinnissa, soita insuliinipumpun takana olevaan puhelinnumeroon.**

Syötä tai tarkasta asianmukaiset asetukset.

### Päämenu > Bolus > Muistutukset<sup>†</sup>

Muistutus 1	<input type="checkbox"/> PÄÄLLÄ	<input type="checkbox"/> POIS		
Aika	<input type="text"/> 00:00			
Muistutus 2	<input type="checkbox"/> PÄÄLLÄ	<input type="checkbox"/> POIS		
Aika	<input type="text"/> 00:00			
VS-tark	<input type="checkbox"/> PÄÄLLÄ	<input type="checkbox"/> POIS		
Boluksen jälkeen	<input type="checkbox"/> 1 h	<input type="checkbox"/> 2 h	<input type="checkbox"/> 3 h	<input type="checkbox"/> 4 h

### Päämenu > Asetus > Aika/Päiväys

Varmista, että insuliinipumppuun ohjelmoitu aika on oikea.

### Päämenu > Asetus > Äänet

Korkea (KOR), kesk. (KES), matala (MAT), värinä (VÄR) tai OFF

N-Bolus (normaali bolus)	<input type="checkbox"/>
A-Bolus (äänibolus)	<input type="checkbox"/>
T-perus (tilapäinen perus)	<input type="checkbox"/>
Huom.	<input type="checkbox"/>
Muist.	<input type="checkbox"/>
Varoitus	<input type="checkbox"/>
Hälytys	<input type="checkbox"/>

### Päämenu > Asetus > Lisäasetus 1 Äänibolus<sup>‡</sup>

Päällä	<input type="checkbox"/> PÄÄLLÄ	<input type="checkbox"/> POIS		
Annosteluvaihe	<input type="text"/> 0,1U	<input type="text"/> 0,5U	<input type="text"/> 1,0U	<input type="text"/> 5,0U

### Päämenu > Asetus > Lisäasetus 2 Bolus

Erik.bolus	<input type="checkbox"/> PÄÄLLÄ	<input type="checkbox"/> POIS
Muistutukset	<input type="checkbox"/> PÄÄLLÄ	<input type="checkbox"/> POIS
Annostelu	<input type="checkbox"/> NRML	<input type="checkbox"/> HIDAS

### Perusohjelmat

<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 4
----------------------------	----------------------------

**Jos tarvitset apua asetusten saamiseksi insuliinipumpustasi tai niiden ohjelmoinnissa, soita insuliinipumpun takana olevaan puhelinnumeroon.**

### Päämenu > Asetus > Lisäasetus 3 Maksimirajat

Maksimiperus \_\_\_\_\_ U/h  
Maksimibolus \_\_\_\_\_ U  
Maks vrk \_\_\_\_\_ U  
Maks 2 h \_\_\_\_\_ U

### Päämenu > Asetus > Lisäasetus 4

Kieli \_\_\_\_\_ Suomi \_\_\_\_\_ Englanti  
Näyttö sammu (s) päästä \_\_\_\_\_ 15 \_\_\_\_\_ 30 \_\_\_\_\_ 45 \_\_\_\_\_ 60  
Paristo \_\_\_\_\_ Lith \_\_\_\_\_ Aikl

### Päämenu > Asetus > Lisäasetus 5 Autopysäytys

Käyttöön \_\_\_\_\_ POIS \_\_\_\_\_ PÄÄLLÄ  
Kun käytössä, keskeytys \_\_\_\_\_ h kuluttua, jos et paina jtk napp.

### Päämenu > Asetus > Lisäasetus 6

Säiliö loppuilla -varoitus \_\_\_\_\_ 10 \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ 30 \_\_\_\_\_ 40 \_\_\_\_\_ 50  
Tukosherkkyys \_\_\_\_\_ M \_\_\_\_\_ K

### Päämenu > Asetus > Lisäasetus 7 Bolus<sup>s</sup>

Insuliinin ja hiilihydraatin suhde			Insuliiniherkkyystekijä (IHT)			VS-tavoite			
I:HH-suhde	Aika	1U: __g	IHT	Aika	1U: __mmol/L	VS-tavoite	Aika	mmol/L	+/- mmol/L
1/12	00:00		1/12	00:00		1/12	00:00		
2/12			2/12			2/12			
3/12			3/12			3/12			
4/12			4/12			4/12			
5/12			5/12			5/12			

### Päämenu > Asetus > Lisäasetus 8 Bolusins. jälj.

IOB-2 \_\_\_\_\_ PÄÄLLÄ \_\_\_\_\_ POIS  
Kesto \_\_\_\_\_ h

### Päämenu > Asetus > Lisäasetus 9 Sairauspäivät

VS yli \_\_\_\_\_ mmol/L  
Ketonien tark. joka \_\_\_\_\_ h  
VS:n tark. joka \_\_\_\_\_ h

**Jos tarvitset apua asetusten saamiseksi insuliinipumpustasi tai niiden ohjelmoinnissa, soita insuliinipumpun takana olevaan puhelinnumeroon.**

## OSA B - ANIMAS® VIBE™ -INSULIINIPUMPUN UUDET ASETUKSET

### Päämenu > CGM

Animas® Vibe™ -insuliinipumppua voidaan käyttää yhdessä Dexcom G4® PLATINUM CGM -järjestelmän kanssa. Jos käytät insuliinipumppusi kanssa Dexcom G4® PLATINUM CGM -järjestelmää, tällä valinnalla pääset CGM-menunäytölle, josta voit käyttää kaikkia pumpussa olevia CGM-toimintoja. Jos et käytä Dexcom G4® PLATINUM CGM -järjestelmää Animas® Vibe™ -insuliinipumpun kanssa, CGM-toiminnot ja -tiedot eivät ole käytettävissä pumpun näytöllä. Lisätietoja tästä toiminnosta ja Animas® Vibe™ -insuliinipumpun asetuksista saa terveydenhoidon palveluntarjoajalta.

Ennen kuin voit aloittaa käyttämään uutta Animas® Vibe™ -insuliinipumppua, sinun on syötettävä nykyisen Animas® -insuliinipumpun asetukset uuteen Animas® Vibe™ -insuliinipumppuun edellisillä sivuilla muistiin merkitsemilläsi tiedoilla.

Ota yhteyttä terveydenhoidon palveluntarjoajaan, jos sinulla on kysyttävää syötettävistä asetuksista. Jos et käytä terveydenhoitotiimisi määrittämiä asetuksia, insuliinin annostelumäärät ovat todennäköisesti vääriä.

**Jos tarvitset apua asetusten saamiseksi insuliinipumpustasi tai niiden ohjelmoinnissa, soita insuliinipumpun takana olevaan puhelinnumeroon.**

**TÄRKEÄÄ: Nämä ohjeet on yksinkertaistettu, ja ne täydentävät terveydenhoidon palveluntarjoajan antamaa koulutusta.**

**Lue ennen aloittamista tämä käyttöopas sekä kaikki Animas® Vibe™ -järjestelmän mukana tulleet liitteet huolellisesti.**

† Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä henkilökohtaisen muistutustoiminnon. Muistutukset-toiminto avataan valitsemalla Päämenu > Asetus > Lisäasetus 2 (Muistutukset) Kun tämä toiminto on päällä, insuliinipumppu näyttää muistutukset bolusmenussa.

‡ Tämä menu avataan Animas® Vibe™ -insuliinipumpussa valitsemalla Päämenu > Asetus > Lisäasetus 7.

§ Tämä menu avataan Animas® Vibe™ -insuliinipumpussa valitsemalla Päämenu > Asetus > Lisäasetus 1.

