

Efter införande av ett nytt infusionsset, måste den tomma kanylen fyllas med insulin. Mängden insulin som krävs varierar. Se bruksanvisningen för infusionssetet för specifika instruktioner. Nedan anges kanylängden och insulinfyllning som krävs för Animas mest använda infusionsset.*

inset® 30	13 mm - fyll en tom kanyl med 0,70 enheter insulin
inset® II	6 mm - fyll en tom kanyl med 0,30 enheter insulin 9 mm - fyll en tom kanyl med 0,50 enheter insulin
comfort™	17 mm - fyll en tom kanyl med 0,70 enheter insulin
comfort™ short	13 mm - fyll en tom kanyl med 0,70 enheter insulin
contact® detach	Ingen kanylfyllning krävs. Prima infusionssetet tills allt läkemedel fördelas från spetsen före införande.

- Kom ihåg att bara fylla kanylen när du sätter i ett nytt infusionsset.
- För en genomgång av hur du sätter i infusionssetet, besök: www.infusion-set.com
- För alla infusionsset, se bipacksedeln och tillverkarens instruktioner

* Denna information lämnas endast som referens. Läs alltid bruksanvisningen som medföljer infusionssetet för att verifiera kanylfyllningskraven.