

Kun uusi infuusiosetti on asennettu, tyhjä kanyyli on täytettävä insuliinilla. Tarvittava insuliinimäärä vaihtelee. Lue asianmukaiset ohjeet infuusiosetin käyttöoppaasta. Seuraavassa luetellaan kanyylien pituudet ja tarvittavat insuliinimäärät Animasin yleisimmin käytetyille infuusioseteille.\*

<b>inset® 30</b>	13 mm - täytä tyhjä kanyyli 0,70 yksiköllä insuliinia
<b>inset® II</b>	6 mm - täytä tyhjä kanyyli 0,30 yksiköllä insuliinia 9 mm - täytä tyhjä kanyyli 0,50 yksiköllä insuliinia
<b>comfort™</b>	17 mm - täytä tyhjä kanyyli 0,70 yksiköllä insuliinia
<b>comfort™ short</b>	13 mm - täytä tyhjä kanyyli 0,70 yksiköllä insuliinia
<b>contact™ detach</b>	Kanyylyä ei tarvitse täyttää. Täytä infuusiosettiä, kunnes kaikki lääkeaine on ulkona kärjestä ennen asennusta.

- Muista täyttää kanyyli vain, kun uusi infuusiosetti asennetaan.
- Infuusiosetin asennusohjeet ovat osoitteessa [www.infusion-set.com](http://www.infusion-set.com).
- Lue infuusiosetin tuoteseloste ja valmistajan ohjeet.

\* Tämä tieto annetaan vain viitteeksi. Tarkista kanyylin täyttövaatimukset aina infuusiosetin mukana toimitetusta käyttöoppaasta.