

Grattis till din nya Animas® Vibe™ insulinpump och CGM-system. Detta dokument är utformat för att hjälpa dig att överföra inställningarna på din nuvarande Animas® insulinpump till din nya Animas® Vibe™ insulinpump.

Inställningar på Animas® insulinpump

DEL A - INSTÄLLNINGARNA PÅ DIN NUVARANDE INSULINPUMP

Ange följande information från din nuvarande Animas® insulinpump. Detta säkerställer att du har en skriftlig kopia, för att underlätta programmeringen av dina personliga inställningar till Animas® Vibe™ insulinpumpen. Dina nuvarande basalprogramhastigheter finns i Animas® insulinpumpen via Huvudmeny > Basal. Ett "A" visas till vänster om det basalprogram som för närvarande är aktivt.

| Basalprogramhastigheter | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| Program 1 | | Program 2* | | Program 3* | | Program 4* | |
| Veckodag | | Övrigt | | Veckoslut | | Motion | |
| Totala E | | Totala E | | Totala E | | Totala E | |
| Start | E/tim | Start | E/tim | Start | E/tim | Start | E/tim |
| 12:00 A | | 12:00 A | | 12:00 A | | 12:00 A | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

*Du kan ha fyra basalprogram som visas i Basalmenyn, om du aktiverat programmet i Inställning > Avancerad 2 (Basalprogram).

Om du behöver hjälp med att få inställningar från din insulinpump eller programmera dessa inställningar, ska du ringa telefonnumret på baksidan av insulinpumpen.

Ange eller kontrollera lämpliga inställningar.

Huvudmeny > Bolus > Påminnelser†

| | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Påminnelse 1 | _____ PÅ | _____ AV | | |
| Tid | _____ FM | _____ EM | | |
| Påminnelse 2 | _____ PÅ | _____ AV | | |
| Tid | _____ FM | _____ EM | | |
| BG-kontroll | _____ PÅ | _____ AV | | |
| Efter bolus | _____ 1 tim | _____ 2 tim | _____ 3 tim | _____ 4 tim |

Huvudmeny > Inställning > Tid/Datum

Se till att den tid du ställer in insulinpumpen på är korrekt.

Huvudmeny > Inställning > Ljud

Högt (H), Medium (M), Lågt (L), Vibrera (V), eller AV

| | |
|-----------------------------|-------|
| N-Bolus (Normal bolus) | _____ |
| A-Bolus (Audiobolus) | _____ |
| T-Basal (Temporär basaldos) | _____ |
| Meddelande | _____ |
| Påminnelse | _____ |
| Varning | _____ |
| Larm | _____ |

Huvudmeny > Inställning > Avancerad 1 Audiobolus‡

| | | | | |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Funktion | _____ PÅ | _____ AV | | |
| Doseringssteg | _____ 0,1E | _____ 0,5E | _____ 1,0E | _____ 5,0E |

Huvudmeny > Inställning > Avancerad 2 bolus

| | | | |
|-------------|------------|---------------|--|
| Av. bolus | _____ PÅ | _____ AV | |
| Påminnelser | _____ PÅ | _____ AV | |
| Tillförsel | _____ NRML | _____ LÅNGSAM | |

Basal

| | | |
|---------|---------|---------|
| Program | _____ 1 | _____ 4 |
|---------|---------|---------|

Om du behöver hjälp med att få inställningar från din insulinpump eller programmera dessa inställningar, ska du ringa telefonnumret på baksidan av insulinpumpen.

Huvudmeny > Inställning > Avancerad 3 maxgränser

Max basal _____ E/tim
Maxbolus _____ E
Max daglig _____ E
Max 2 tim _____ E

Huvudmeny > Inställning > Avancerad 4

Språk _____ Engelska _____ Svenska
Skärmvisningstid _____ 15 _____ 30 _____ 45 _____ 60
(sekunder)
Batteri _____ Lit _____ Alk

Huvudmeny > Inställning > Avancerad 5 Auto Off

Funktion _____ AV _____ PÅ
När denna är aktiverad, stoppa om _____ timmar om inga knappar trycks ned.

Huvudmeny > Inställning > Avancerad 6

Varning om låg ampull _____ 10 _____ 20 _____ 30 _____ 40 _____ 50
Ocklusionskänslighet _____ V _____ H

Huvudmeny > Inställning > Avancerad 7^s

| Förhållanden mellan insulin och kolhydrater | | | Din insulinkänslighetsfaktor (ISF) | | | Blodsockermål (BG) | | | |
|---|---------|---------|------------------------------------|---------|--------------|--------------------|---------|--------|------------|
| I:K-kvot | Tid | 1E: __g | ISF | Tid | 1E: __mmol/L | Blodsockermål | Tid | mmol/L | +/- mmol/L |
| 1 av 12 | 12:00 A | | 1 av 12 | 12:00 A | | 1 av 12 | 12:00 A | | |
| 2 av 12 | | | 2 av 12 | | | 2 av 12 | | | |
| 3 av 12 | | | 3 av 12 | | | 3 av 12 | | | |
| 4 av 12 | | | 4 av 12 | | | 4 av 12 | | | |
| 5 av 12 | | | 5 av 12 | | | 5 av 12 | | | |

Huvudmeny > Inställning > Avancerad 8 Insulin i kroppen

IOB-2 _____ PÅ _____ AV
Duration _____ tim

Huvudmeny > Inställning > Avancerad 9 Sjukdagar

BG över _____ mmol/L
Kontrollera ketoner var _____ timme
Kontrollera BG var _____ timme

Om du behöver hjälp med att få inställningar från din insulinpump eller programmera dessa inställningar, ska du ringa telefonnumret på baksidan av insulinpumpen.

DEL B - NYA INSTÄLLNINGAR FÖR ANIMAS® VIBE™ INSULINPUMP

Huvudmeny > CGM

Animas® Vibe™ insulinpump kan användas tillsammans med Dexcom G4® PLATINUM-systemet för kontinuerlig blodsockermätning (CGM). Om du använder Dexcom G4® PLATINUM CGM-systemet med din insulinpump, tar detta val dig till CGM-menyskärmen där du kan öppna alla CGM-funktioner som är tillgängliga på din pump. Om du inte använder Dexcom G4® PLATINUM CGM-systemet med din Animas® Vibe™ insulinpump, kommer CGM-funktionerna och data inte att fungera på din insulinpumpdisplay. Rådfråga ditt hälsovårdsteam för ytterligare information om denna funktion och inställning i din Animas® Vibe™ insulinpump.

För att börja använda dina nya Animas® Vibe™ insulinpump, måste du manuellt ange inställningarna från din nuvarande Animas® insulinpump i din nya Animas® Vibe™ insulinpump med användning av informationen som du har registrerat in på föregående sidor.

Kontakta ditt hälsovårdsteam om du har några frågor om de inställningar som du matar in. Underlåtenhet att använda inställningar som fastställts av ditt hälsovårdsteam kommer sannolikt resultera i felaktig insulintillförselmängd.

Om du behöver hjälp med att få inställningar från din insulinpump eller programmera dessa inställningar, ska du ringa telefonnumret på baksidan av insulinpumpen.

VIKTIGT: Dessa instruktioner är förenklade för att komplettera utbildningen du får av din sjukvårdspersonal.

Innan du börjar bör du noggrant läsa användarhandboken och eventuella bipacksedlar som medföljer ditt Animas® Vibe™ system.

† Du kan ha din personliga Påminnelse-funktion påslagen eller avstängd. Funktionen Påminnelse finns i Huvudmeny > Inställning > Avancerad 2 (Påminnelser).

När denna funktion är på, visar insulinpumpen Påminnelser i bolusmenyn.

‡ Denna meny kommer att finnas i Animas® Vibe™ insulinpumpen på Huvudmeny > Inställning > Avancerad 7.

§ Denna meny kommer att finnas i Animas® Vibe™ insulinpumpen på Huvudmeny > Inställning > Avancerad 1.