

diasend[®] Mobile App


























– PIKAOPAS LATAUSTA VARTEN

D0422v10F 2021-01-27
tukee tuotetta A14030R1I

glooko

Sisältö

Huomaa, että joitakin seuraavista potilaslaitteista ei välttämättä ole saatavilla omalla markkina-alueellasi.

-  Acon OnCall Extra Mobile
-  Acon OnCall Sure Sync
-  AgaMatrix WaveSense JAZZ Wireless
-  Ascensia Contour Care
-  Ascensia Contour Next
-  Ascensia Contour Next One
-  Ascensia Contour Plus One
-  ForaCare FORA 6 Connect
-  ForaCare FORA Diamond MINI DM30
-  ForaCare FORA GD40h
-  i-Sens Caresens Dual
-  i-Sens NoCoding1 Plus
-  i-Sens TEE2+
-  Menarini Glucofix Tech
-  Menarini GlucoMen areo 2K
-  Menarini GlucoMen areo
-  Nipro 4Sure Smart
-  Nipro 4Sure SmartDuo
-  NovoPen
-  Roche Accu-Chek Aviva Connect
-  Roche Accu-Chek Guide
-  Roche Accu-Chek Instant
-  Sanofi MyStar Plus
-  SOOIL Dana RS
-  Trividia TRUE METRIX AIR


Etkö löytänyt laitettasi luettelosta?

Lataa palvelimelle diasend® Uploader -sovelluksen avulla Mac- tai PC-tietokoneestasi

(viimeinen sivu)

Acon OnCall Extra Mobile




1. Varmista, että Bluetooth on käytössä mobiililaitteessasi ja että mittarisi on 10 metrin säteellä.
2. Käynnistä diasend[®]-mobiilisovellus.
3. Siirry alimmassa valikossa kohtaan **LATAA**.
 (iOS-mobiililaitteet: valitse siirtotavaksi Bluetooth.)
4. Paina sovelluksessa **Käynnistä lähetys**.
5. Paina ja pidä molempia mittarin nuolinäppäimiä painettuna, kunnes näyttö on päällä. Näytöllä tulisi näkyä teksti "bt".
6. Valitse mittarisi, kun se näkyy sovelluksessa. Kun sinua pyydetään muodostamaan pari yhteys mittariin, syötä mittarin takaosassa olevan mittarin sarjanumeron kuusi viimeistä numeroa.
7. diasend[®]-sovellus muodostaa nyt yhteyden mittariin ja aloittaa synkronoinnin.
8. Mittarin synkronoiminen tulevaisuudessa: Käynnistä diasend[®]-sovellus, siirry kohtaan **LATAA** ja paina **Käynnistä lähetys**. Käynnistä mittari painamalla molempia nuolinäppäimiä, jolloin synkronointi aloitetaan automaattisesti.



Acon OnCall Sure Sync



1. Varmista, että Bluetooth on käytössä mobiililaitteessasi ja että mittarisi on 10 metrin säteellä.
2. Käynnistä diasend[®]-mobiilisovellus.
3. Siirry alimmassa valikossa kohtaan **LATAA**.
 (iOS-mobiililaitteet: valitse siirtotavaksi Bluetooth.)
4. Paina sovelluksessa **Käynnistä lähetys**.
5. Paina ja pidä molempia mittarin nuolinäppäimiä painettuna, kunnes näyttö on päällä. Näytöllä tulisi näkyä teksti "bt".
6. Valitse mittarisi, kun se näkyy sovelluksessa. Kun sinua pyydetään muodostamaan pariyhteys mittariin, syötä mittarin takaosassa olevan mittarin sarjanumeron kuusi viimeistä numeroa.
7. diasend[®]-sovellus muodostaa nyt yhteyden mittariin ja aloittaa synkronoinnin.
8. Mittarin synkronoiminen tulevaisuudessa: Käynnistä diasend[®]-sovellus, siirry kohtaan **LATAA** ja paina **Käynnistä lähetys**. Käynnistä mittari painamalla molempia nuolinäppäimiä, jolloin synkronointi alkaa automaattisesti.


AgaMatrix WaveSens JAZZ Wireless



1. Varmista, että Bluetooth on käytössä mobiililaitteessasi ja että mittarisi on 10 metrin säteellä.
2. Käynnistä diasend®-mobiilisovellus.
3. Siirry alimmassa valikossa kohtaan **LATAA**.

(iOS-mobiililaitteet: valitse siirtotavaksi Bluetooth.)
4. Paina sovelluksessa **Käynnistä lähetys**.
5. Paina mittarissasi mittarin painiketta, kunnes Bluetooth-kuvake alkaa vilkkua.
6. Valitse mittarisi, kun se näkyy sovelluksessa. Mittarin näyttöön tulee 6-numeroinen salasana.

Salasanaa esittävä esimerkkikuva:

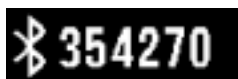

7. Kirjoita numero sovellukseen.
8. Mittarin näyttöön tuleva valintamerkki ilmaisee, että pari yhteyden muodostaminen onnistui.


Valintamerkkiä esittävä esimerkkikuva.



9. Mittari ja sovellus aloittavat synkronoinnin.
10. Mittarin synkronoiminen tulevaisuudessa: Käynnistä diasend®-sovellus, siirry kohtaan **LATAA** ja paina **Käynnistä lähetys**. Synkronointi aloitetaan automaattisesti, kun kytket virran mittariin.

Ascensia Contour Care



1. Kytke mittarin virta POIS PÄÄLTÄ.
2. Varmista, että Bluetooth on käytössä mobiililaitteessasi ja että mittarisi on 10 metrin säteellä.
3. Käynnistä diasend[®]-mobiilisovellus.
4. Siirry alimmassa valikossa kohtaan **LATAA**.

(iOS-mobiililaitteet: valitse siirtotavaksi Bluetooth).
5. Paina sovelluksessa **Käynnistä lähetys**.
6. Kytke mittarin virta PÄÄLLE. Pidä molempia nuolinäppäimiä painettuina, kunnes Bluetooth-symboli alkaa vilkkua näytössä.
7. Valitse mittarisi, kun se näkyy sovelluksessa.
8. Vahvista parinmuodostuspyyntö diasend[®]-sovelluksessa käyttämällä mittarin näytössä näkyvää koodia.
9. Mittari ja sovellus aloittavat synkronoinnin.
10. Mittarin synkronointi tulevaisuudessa:
Käynnistä diasend[®]-sovellus, siirry kohtaan **LATAA** ja paina **Käynnistä lähetys**.
Synkronointi aloitetaan automaattisesti, kun kytket virran mittariin.

Ascensia Contour Next



1. Kytke mittarin virta POIS PÄÄLTÄ.
2. Varmista, että Bluetooth on käytössä mobiililaitteessasi ja että mittarisi on 10 metrin säteellä.
3. Käynnistä diasend[®]-mobiilisovellus.
4. Siirry alimmassa valikossa kohtaan **LATAA**.

(iOS-mobiililaitteet: valitse siirtotavaksi Bluetooth).
5. Paina sovelluksessa **Käynnistä lähetys**.
6. Kytke mittarin virta PÄÄLLE. Pidä molempia nuolinäppäimiä painettuina, kunnes Bluetooth-symboli alkaa vilkkua näytössä.
7. Valitse mittarisi, kun se näkyy sovelluksessa.
8. diasend[®]-sovellus muodostaa nyt yhteyden mittariin.
9. Vahvista parinmuodostuspyyntö diasend[®]-sovelluksessa käyttämällä mittarin näytössä näkyvää koodia.
10. Mittari ja sovellus aloittavat synkronoinnin.
11. Mittarin synkronointi tulevaisuudessa:
Käynnistä diasend[®]-sovellus, siirry kohtaan **LATAA** ja paina **Käynnistä lähetys**.
Synkronointi aloitetaan automaattisesti, kun kytket virran mittariin.

Ascensia Contour Next One



1. Katkaise mittarin virta.
2. Varmista, että Bluetooth on käytössä mobiililaitteessasi ja että mittarisi on 10 metrin säteellä.
3. Käynnistä diasend®-mobiilisovellus.
4. Siirry alimmassa valikossa kohtaan **LATAA**.

(iOS-mobiililaitteet: valitse siirtotavaksi Bluetooth.)
5. Paina sovelluksessa **Käynnistä lähetys**.
6. Paina mittarin **OK-painiketta** niin pitkään, että testiliuska-portion sininen valo alkaa vilkkua. Mittarin sarjanumero tulee näkyviin näyttöön.

Mittaria pariyhteyden muodostamistilassa esittävä esimerkkikuva:



7. Valitse mittarisi sarjanumero sovelluksessa.
8. diasend®-sovellus muodostaa nyt yhteyden mittariin.
9. Vahvista pariyhteyden muodostamispyyntö diasend®-sovelluksessa.
10. Mittari ja sovellus aloittavat synkronoinnin.
11. Mittarin synkronoiminen tulevaisuudessa: Käynnistä diasend®-sovellus, siirry kohtaan **LATAA** ja paina **Käynnistä lähetys**. Synkronointi aloitetaan automaattisesti, kun kytket virran mittariin.

Ascensia Contour Plus One



1. Katkaise mittarin virta.
2. Varmista, että Bluetooth on käytössä mobiililaitteessasi ja että mittarisi on 10 metrin säteellä.
3. Käynnistä diasend[®]-mobiilisovellus.
4. Siirry alimmassa valikossa kohtaan **LATAA**.

(iOS-mobiililaitteet: valitse siirtotavaksi Bluetooth.)
5. Paina sovelluksessa **Käynnistä lähetys**.
6. Paina mittarin **OK-painiketta** niin pitkään, että testiliuska-
portin sininen valo alkaa vilkkua. Mittarin sarjanumero tulee näkyviin näyttöön.

Mittaria pariyhteyden muodostamistilassa esittävä esimerkkikuva:



7. Valitse mittarisi sarjanumero sovelluksessa.
8. diasend[®]-sovellus muodostaa nyt yhteyden mittariin.
9. Vahvista pariyhteyden muodostamispyyntö diasend[®]-sovelluksessa.
10. Mittari ja sovellus aloittavat synkronoinnin.
11. Mittarin synkronoiminen tulevaisuudessa: Käynnistä diasend[®]-sovellus, siirry kohtaan **LATAA** ja paina **Käynnistä lähetys**. Synkronointi aloitetaan automaattisesti, kun kytket virran mittariin.

ForaCare FORA 6 Connect




1. Kytke mittarin virta POIS PÄÄLTÄ.
2. Varmista, että Bluetooth on käytössä mobiililaitteessasi ja että mittarisi on 10 metrin säteellä.
3. Käynnistä diasend[®]-mobiilisovellus.
4. Siirry alimmassa valikossa kohtaan **LATAA**.

(iOS-mobiililaitteet: valitse siirtotavaksi Bluetooth).
5. Paina sovelluksessa **Käynnistä lähetys**.
6. Aloita Bluetooth-parinmuodostus painamalla mittarin ylös osoittavaa nuolta.
7. Valitse mittarisi, kun se näkyy sovelluksessa.
8. Vahvista tarvittaessa parinmuodostus mobiililaitteellasi.
9. Mittari ja sovellus aloittavat synkronoinnin.
10. Mittarin synkronointi tulevaisuudessa:
Käynnistä diasend[®]-sovellus, siirry kohtaan **LATAA** ja paina **Käynnistä lähetys**.
Synkronointi aloitetaan automaattisesti, kun kytket virran mittariin.


ForaCare FORA Diamond MINI DM30



1. Kytke mittarin virta POIS PÄÄLTÄ.
2. Varmista, että Bluetooth on käytössä mobiililaitteessasi ja että mittarisi on 10 metrin säteellä.
3. Käynnistä diasend®-mobiilisovellus.
4. Siirry alimmassa valikossa kohtaan **LATAA**.

(iOS-mobiililaitteet: valitse siirtotavaksi Bluetooth).
5. Paina sovelluksessa **Käynnistä lähetys**.
6. Kytke mittari PÄÄLLE ja ota Bluetooth käyttöön kytkemällä mittarin virta jälleen POIS PÄÄLTÄ (valo vilkkuu sinisenä).
7. Valitse mittari diasend®-sovelluksesta.
8. Vahvista tarvittaessa parinmuodostuspyyntö mobiililaitteellasi.
9. Mittari ja sovellus aloittavat synkronoinnin.
10. Mittarin synkronointi tulevaisuudessa: Käynnistä diasend®-sovellus, siirry kohtaan **LATAA** ja paina **Käynnistä lähetys**. Kytke mittari päälle ja ota Bluetooth käyttöön kytkemällä mittarin virta jälleen pois päältä. Synkronointi aloitetaan automaattisesti.


ForaCare FORA GD40h



1. Kytke mittarin virta POIS PÄÄLTÄ.
2. Varmista, että Bluetooth on käytössä mobiililaitteessasi ja että mittarisi on 10 metrin säteellä.
3. Käynnistä diasend[®]-mobiilisovellus.
4. Siirry alimmassa valikossa kohtaan **LATAA**.

(iOS-mobiililaitteet: valitse siirtotavaksi Bluetooth).
5. Paina sovelluksessa **Käynnistä lähetys**.
6. Paina mittarissa vasemmalla puolella olevaa liukupainiketta alaspäin, kunnes sininen valo alkaa vilkkua. Bluetooth on nyt käytössä.
7. Valitse mittarisi diasend[®]-sovelluksessa.
8. Vahvista tarvittaessa parinmuodostuspyyntö mobiililaitteellasi.
9. Mittari ja sovellus aloittavat synkronoinnin.
10. Mittarin synkronointi tulevaisuudessa:
Käynnistä diasend[®]-sovellus, siirry kohtaan **LATAA** ja paina **Käynnistä lähetys**. Ota Bluetooth käyttöön painamalla mittarin liukupainiketta alaspäin. Synkronointi aloitetaan automaattisesti.

i-Sens CareSens Dual




1. Kytke mittarin virta POIS PÄÄLTÄ.
2. Varmista, että Bluetooth on käytössä mobiililaitteessasi ja että mittarisi on 10 metrin säteellä.
3. Käynnistä diasend[®]-mobiilisovellus.
4. Siirry alimmassa valikossa kohtaan **LATAA**.

(iOS-mobiililaitteet: valitse siirtotavaksi Bluetooth).
5. Paina sovelluksessa **Käynnistä lähetys**.
6. Bluetooth-parinmuodostuksen käyttöönotto mittarissa:
Pidä mittarin **S**-painiketta painettuna, kunnes näytössä näkyy **SET**. Paina nuolipainiketta, kunnes **YES** alkaa vilkkua. Vahvista painamalla **S**-painiketta. Näyttöön ilmestyy **bT**. Paina nuolipainiketta, kunnes **Pair** alkaa vilkkua. Vahvista painamalla **S**-painiketta.
Pin ilmestyy näyttöön.
7. Valitse mittarisi diasend[®]-sovelluksessa.
8. Mittarin näytössä näkyy PIN-numero (6 numeroa). Vahvista parinmuodostuspyyntö antamalla PIN-numero diasend[®]-sovelluksessa.
9. Mittari ja sovellus aloittavat synkronoinnin.
10. Mittarin synkronointi tulevaisuudessa:
Käynnistä diasend[®]-sovellus, siirry kohtaan **LATAA** ja paina **Käynnistä lähetys**.
Synkronointi aloitetaan automaattisesti*, kun kytket virran mittariin.

**Vain, jos tietoja on lähettämättä.*

i-Sens NoCoding1 Plus




1. Kytke mittarin virta POIS PÄÄLTÄ.
2. Varmista, että Bluetooth on käytössä mobiililaitteessasi ja että mittarisi on 10 metrin säteellä.
3. Käynnistä diasend[®]-mobiilisovellus.
4. Siirry alimmassa valikossa kohtaan **LATAA**.

(iOS-mobiililaitteet: valitse siirtotavaksi Bluetooth).
5. Paina sovelluksessa **Käynnistä lähetys**.
6. Bluetooth-parinmuodostuksen käyttöönotto mittarissa:
Pidä mittarin **virtapainiketta** painettuna, kunnes näytössä näkyy **SET**. Paina nuolipainiketta, kunnes **YES** alkaa vilkkua. Vahvasta painamalla **virtapainiketta**. Näyttöön ilmestyy **bT**. Paina nuolipainiketta, kunnes **Pair** alkaa vilkkua. Vahvasta painamalla **virtapainiketta**. **Pin** ilmestyy näyttöön.
7. Valitse mittarisi diasend[®]-sovelluksessa.
8. Mittarin näytössä näkyy PIN-numero (6 numeroa). Vahvasta parinmuodostuspyyntö antamalla PIN-numero diasend[®]-sovelluksessa.
9. Mittari ja sovellus aloittavat synkronoinnin.
10. Mittarin synkronointi tulevaisuudessa:
Käynnistä diasend[®]-sovellus, siirry kohtaan **LATAA** ja paina **Käynnistä lähetys**. Synkronointi aloitetaan automaattisesti*, kun kytket virran mittariin.

*Vain, jos tietoja on lähettämättä.

i-Sens TEE2+



1. Kytke mittarin virta POIS PÄÄLTÄ.
2. Varmista, että Bluetooth on käytössä mobiililaitteessasi ja että mittarisi on 10 metrin säteellä.
3. Käynnistä diasend[®]-mobiilisovellus.
4. Siirry alimmassa valikossa kohtaan **LATAA**.

(iOS-mobiililaitteet: valitse siirtotavaksi Bluetooth).
5. Paina sovelluksessa **Käynnistä lähetys**.
6. Bluetooth-parinmuodostuksen käyttöönotto mittarissa:
Pidä mittarin **virtapainiketta** painettuna, kunnes näytössä näkyy **SET**. Paina nuolipainiketta, kunnes **YES** alkaa vilkkua. Vahvista painamalla **virtapainiketta**. Näyttöön ilmestyy **bT**. Paina nuolipainiketta, kunnes **Pair** alkaa vilkkua. Vahvista painamalla **virtapainiketta**. **Pin** ilmestyy näyttöön.
7. Valitse mittarisi diasend[®]-sovelluksessa.
8. Mittarin näytössä näkyy PIN-numero (6 numeroa). Vahvista parinmuodostuspyyntö antamalla PIN-numero diasend[®]-sovelluksessa.
9. Mittari ja sovellus aloittavat synkronoinnin.
10. Mittarin synkronointi tulevaisuudessa:
Käynnistä diasend[®]-sovellus, siirry kohtaan **LATAA** ja paina **Käynnistä lähetys**. Synkronointi aloitetaan automaattisesti*, kun kytket virran mittariin.

**Vain, jos tietoja on lähettämättä.*



Menarini Glucofix Tech

(Ainoastaan Android)



1. Varmista, että NFC on käytössä mobiililaitteessasi ja mittarissasi.
2. Katkaise mittarisi virta ja käynnistä diasend®-mobiilisovellus. Pidä mittaria mobiililaitteesi NFC-piirin lähellä. (Yleensä NFC sijaitsee mobiililaitteen takaosassa.)

Ota NFC käyttöön mittarissasi seuraavasti:

1. Katkaise mittarin virta.
2. Pidä **ON/OFF-painiketta** painettuna, kunnes näytössä näkyy "set".
3. Paina **Alas-painiketta**, kunnes "N" alkaa vilkkua.
4. Valitse tämä toiminto painamalla **ON/OFF-painiketta**.
5. Paina **Alas-painiketta** kerran."On" alkaa vilkkua.
6. Vahvista painamalla **ON/OFF-painiketta** kerran.
7. Katkaise mittarin virta.



Menarini GlucoMen areo 2K



1. Varmista, että NFC on käytössä mobiililaitteessasi ja mittarissasi.
2. Katkaise mittarisi virta ja käynnistä diasend®-mobiilisovellus. Pidä mittaria mobiililaitteesi NFC-piirin lähellä. (Yleensä NFC sijaitsee mobiililaitteen takaosassa.)

Huomaa: iOS-käyttäjillä NFC toimii tässä mittarissa vain, jos mittari on valmistettu vuonna 2018 tai sen jälkeen.

Ota NFC käyttöön mittarissasi seuraavasti:

1. Katkaise mittarin virta.
2. Mittarisi versiosta riippuen: Siirry asetusvalikkoon pitämällä **virtapainiketta** tai samanaikaisesti **virtapainiketta** ja **ylänuolipainiketta** painettuna, kunnes näytöllä näkyy ”set”.
3. Paina **Alas-painiketta**, kunnes ”N” alkaa vilkkua.
4. Valitse tämä toiminto painamalla **ON/OFF-painiketta**.
5. Paina **Alas-painiketta** kerran.”On” alkaa vilkkua.
6. Vahvasta painamalla **ON/OFF-painiketta** kerran.
7. Katkaise mittarin virta.



Menarini GlucoMen areo

(Ainoastaan Android)



1. Varmista, että NFC on käytössä mobiililaitteessasi ja mittarissasi.
2. Katkaise mittarisi virta ja käynnistä diasend[®]-mobiilisovellus. Pidä mittaria mobiililaitteesi NFC-piirin lähellä. (Yleensä NFC sijaitsee mobiililaitteen takaosassa.)


Ota NFC käyttöön mittarissasi seuraavasti:

1. Katkaise mittarin virta.
2. Pidä **ON/OFF-painiketta** painettuna, kunnes näytössä näkyy "set".
3. Paina **Alas-painiketta**, kunnes "N" alkaa vilkkua.
4. Valitse tämä toiminto painamalla **ON/OFF-painiketta**.
5. Paina **Alas-painiketta** kerran."On" alkaa vilkkua.
6. Vahvista painamalla **ON/OFF-painiketta** kerran.
7. Katkaise mittarin virta.




Nipro 4Sure Smart



1. Kytke mittarin virta POIS PÄÄLTÄ.
2. Varmista, että Bluetooth on käytössä mobiililaitteessasi ja että mittarisi on 10 metrin säteellä.
3. Käynnistä diasend[®]-mobiilisovellus.
4. Siirry alimmassa valikossa kohtaan **LATAA**.

(iOS-mobiililaitteet: valitse siirtotavaksi Bluetooth).
5. Paina sovelluksessa **Käynnistä lähetys**.
6. Kytke mittari PÄÄLLE. Bluetooth otetaan käyttöön automaattisesti.
7. Valitse mittarisi sovelluksessa.
8. Vahvista tarvittaessa parinmuodostuspyyntö mobiililaitteellasi.
9. Mittari ja sovellus aloittavat synkronoinnin.
10. Mittarin synkronointi tulevaisuudessa:
Käynnistä diasend[®]-sovellus, siirry kohtaan **LATAA** ja paina **Käynnistä lähetys**.
Synkronointi aloitetaan automaattisesti, kun kytket virran mittariin.

Nipro 4Sure SmartDuo




1. Kytke mittarin virta POIS PÄÄLTÄ.
2. Varmista, että Bluetooth on käytössä mobiililaitteessasi ja että mittarisi on 10 metrin säteellä.
3. Käynnistä diasend[®]-mobiilisovellus.
4. Siirry alimmassa valikossa kohtaan **LATAA**.

(iOS-mobiililaitteet: valitse siirtotavaksi Bluetooth).
5. Paina sovelluksessa **Käynnistä lähetys**.
6. Kytke laitteen virta PÄÄLLE. Bluetooth otetaan käyttöön automaattisesti.
7. Valitse mittarisi sovelluksessa.
8. Vahvista tarvittaessa parinmuodostuspyyntö mobiililaitteellasi.
9. Mittari ja sovellus aloittavat synkronoinnin.
10. Mittarin synkronointi tulevaisuudessa:
Käynnistä diasend[®]-sovellus, siirry kohtaan **LATAA** ja paina **Käynnistä lähetys**.
Synkronointi aloitetaan automaattisesti, kun kytket virran mittariin.




NovoPen[®] 6

NovoPen Echo[®] Plus



1. Varmista, että NFC on käytössä mobiililaitteessasi.
2. Käynnistä diasend[®]-mobiilisovellus.
3. Siirry alimmassa valikossa kohtaan **LATAA**.
 (iOS-mobiililaitteet: valitse siirtotavaksi NFC.)
4. Pidä NovoPen[®] mobiililaitteesi NFC-piirin lähellä.

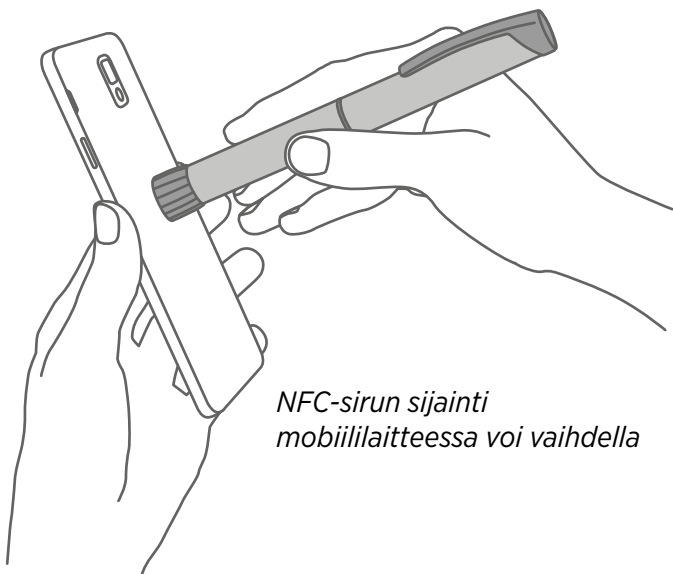

*NFC-sirun sijainti
mobiililaitteessa voi vaihdella*

Roche Accu-Chek Aviva Connect



Pariyhteyden muodostaminen mittariin


1. Varmista, että Bluetooth on käytössä mobiililaitteessasi ja että mittarisi on 10 metrin säteellä.
2. Kytke mittariin virta painamalla **OK**.
3. Valitse **Settings** ja paina **OK**.




4. Valitse **Wireless** vierittämällä alaspäin ja paina **OK**.



5. Valitse **Yes** ja paina **OK**.

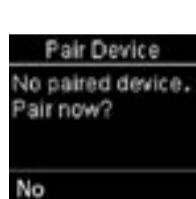


6. Käynnistä diasend®-mobiilisovellus.
7. Siirry alimmassa valikossa kohtaan **LATAA**.

(iOS-mobiililaitteet: valitse siirtotavaksi Bluetooth.)
8. Paina sovelluksessa **Käynnistä lähetys**.
9. Valitse mittarisi, kun se näkyy sovelluksessa. Kun sinua pyydetään muodostamaan pariyhteys mittariin, syötä kuusi mittarissa näkyvää numeroa.




Tiedonsiirto

Voit tehdä tiedonsiirron, jos haluat synkronoida kaikki mittarin historiassa olevat lukemat. Tämä lähettää kaikki mittariisi tallennetut lukemat diasend®-sovellukseen.


Paina Takaisin, kunnes olet päävalikossa tai kytke mittariin virta painamalla **OK**.

10. Käynnistä diasend®-mobiilisovellus.
11. Siirry alimmassa valikossa kohtaan **LATAA**.

12. Paina sovelluksessa **Käynnistä lähetys**.

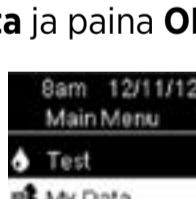
13. Valitse **My Data** ja paina **OK**.

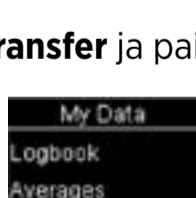

14. Valitse **Data Transfer** ja paina **OK**.



15. Valitse **Wireless** ja paina **OK**.

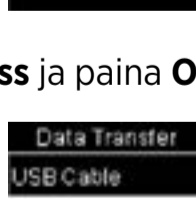


16. Mittarisi ja diasend®-sovellus aloittavat nyt synkronoimisen.

Roche Accu-Chek Guide



Pariyhteyden muodostaminen mittariin


1. Varmista, että Bluetooth on käytössä mobiililaitteessasi ja että mittarisi on 10 metrin säteellä.
2. Kytke mittariin virta painamalla **OK**.
3. Valitse **Settings** ja paina **OK**.

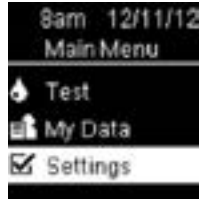


4. Valitse **Wireless** vierittämällä alaspäin ja paina **OK**.



5. Valitse **Yes** ja paina **OK**.

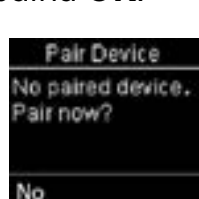


6. Käynnistä diasend®-mobiilisovellus.
7. Siirry alimmassa valikossa kohtaan **LATAA**.
 (iOS-mobiililaitteet: valitse siirtotavaksi Bluetooth.)
8. Paina sovelluksessa **Käynnistä lähetys**.
9. Valitse mittarisi, kun se näkyy sovelluksessa. Kun sinua pyydetään muodostamaan pariyhteys mittariin, syötä kuusi mittarissa näkyvää numeroa.




Tiedonsiirto


Voit tehdä tiedonsiirron, jos haluat synkronoida kaikki mittarin historiassa olevat lukemat. Tämä lähettää kaikki mittariisi tallennetut lukemat diasend®-sovellukseen.

Paina Takaisin, kunnes olet päävalikossa tai kytke mittariin virta painamalla **OK**.

10. Käynnistä diasend®-mobiilisovellus.
11. Siirry alimmassa valikossa kohtaan **LATAA**.

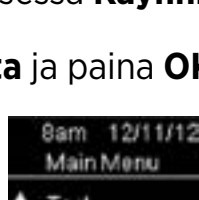12. Paina sovelluksessa **Käynnistä lähetys**.
13. Valitse **My Data** ja paina **OK**.

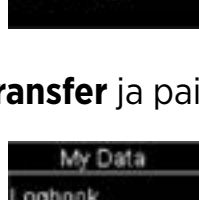

14. Valitse **Data Transfer** ja paina **OK**.



15. Valitse **Wireless** ja paina **OK**.




16. Mittarisi ja diasend®-sovellus aloittavat nyt synkronoimisen.

Roche Accu-Chek Instant



1. Varmista, että Bluetooth on käytössä mobiililaitteessasi ja että mittarisi on 10 metrin säteellä.
2. Kun mittarin virta on katkaistuna, pidä mittarin painiketta painettuna, kunnes Bluetooth-symboli tulee näkyviin. Pariyhteyden muodostussymboli ja langattoman yhteyden symboli tulevat näkyviin ja vilkkuvat.



3. Käynnistä diasend®-mobiilisovellus.
4. Siirry alimmassa valikossa kohtaan **LATAA**.

(iOS-mobiililaitteet: valitse siirtotavaksi Bluetooth.)
5. Paina sovelluksessa **Käynnistä lähetys**.
6. Valitse mittarisi, kun se näkyy sovelluksessa. Kun sovellus pyytää muodostamaan pariyhteyden mittarin kanssa, anna mittarin takana oleva 6-numeroinen PIN-koodi.


PIN-koodia esittävä esimerkkikuva:




7. diasend®-sovellus muodostaa nyt yhteyden mittariin ja aloittaa synkronoinnin.
8. Mittarin synkronointi tulevaisuudessa: Käynnistä diasend®-sovellus, siirry kohtaan **LATAA** ja paina **Käynnistä lähetys**. Synkronointi aloitetaan automaattisesti, kun kytket virran mittariin.

Sanofi MyStar Plus



1. Varmista, että Bluetooth on käytössä mobiililaitteessasi ja että mittarisi on 10 metrin säteellä.
2. Käynnistä diasend[®]-mobiilisovellus.
3. Siirry alimmassa valikossa kohtaan **LATAA**.

(iOS-mobiililaitteet: valitse siirtotavaksi Bluetooth.).
4. Paina sovelluksessa **Käynnistä lähetys**.
5. Paina mittarissasi mittarin painiketta, kunnes Bluetooth-kuvake alkaa vilkkua.
6. Valitse mittarisi, kun se näkyy sovelluksessa. Mittarin näyttöön tulee 6-numeroinen salasana.

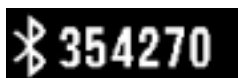Salasanaa esittävä esimerkkikuva:



7. Kirjoita numero sovellukseen.
8. Mittarin näyttöön tuleva valintamerkki ilmaisee, että pari yhteyden muodostaminen onnistui.

Valintamerkkiä esittävä esimerkkikuva.




9. Mittari ja sovellus aloittavat synkronoinnin.
10. Mittarin synkronoiminen tulevaisuudessa: Käynnistä diasend[®]-sovellus, siirry kohtaan **LATAA** ja paina **Käynnistä lähetys**. Synkronointi aloitetaan automaattisesti, kun kytket virran mittariin.



SOOIL Dana RS





1. Kytke pumppu virta POIS PÄÄLTÄ.
2. Varmista, että Bluetooth on käytössä mobiililaitteessasi ja että pumppusi on 10 metrin säteellä.
3. Käynnistä diasend[®]-mobiilisovellus.
4. Siirry alimmassa valikossa kohtaan **LATAA**.

(iOS-mobiililaitteet: valitse siirtotavaksi Bluetooth).
5. Paina sovelluksessa **Käynnistä lähetys**.
6. Kytke pumppu PÄÄLLE. Bluetooth otetaan käyttöön automaattisesti.
7. Valitse pumppusi sovelluksessa.
8. Vahvista tarvittaessa parinmuodostuspyyntö mobiililaitteellasi.
9. Pumppu ja sovellus aloittavat synkronoinnin.
10. Pumpun synkronointi tulevaisuudessa:
Käynnistä diasend[®]-sovellus, siirry kohtaan **LATAA** ja paina **Käynnistä lähetys**.
Synkronointi aloitetaan automaattisesti, kun kytket virran pumpun.



Trividia TRUE METRIX AIR



1. Varmista, että Bluetooth on käytössä mobiililaitteessasi ja että mittarisi on 10 metrin säteellä.
2. Käynnistä diasend®-mobiilisovellus.
3. Siirry alimmassa valikossa kohtaan **LATAA**.

(iOS-mobiililaitteet: valitse siirtotavaksi Bluetooth.)
4. Paina sovelluksessa **Käynnistä lähetys**.
5. Kytke mittariin virta.
6. Bluetooth-symbolin pitäisi tulla automaattisesti näkyviin mittarissasi, ja se tarkoittaa, että Bluetooth on päällä. 
7. Valitse mittarisi, kun se näkyy sovelluksessa (NiproBGM). Kun sinua pyydetään muodostamaan pari yhteys mittariin, syötä mittarin takaosassa olevan mittarin sarjanumeron kuusi viimeistä numeroa.

Sarjanumeroa esittävä esimerkkikuva:



8. diasend®-sovellus muodostaa nyt yhteyden mittariin ja aloittaa synkronoinnin.
9. Mittarin synkronoiminen tulevaisuudessa: Käynnistä diasend®-sovellus, siirry kohtaan **LATAA** ja paina **Käynnistä lähetys**. Synkronointi aloitetaan automaattisesti, kun kytket virran mittariin.

Lataa diasend[®]-sovelluksen avulla Uploader-sovellus Mac- tai PC-tietokoneellasi



1. Hae diasend[®] Uploader -sovellus Mac- tai PC-koneelle. Voit tehdä tämän kirjautumalla sisään osoitteessa diasend.com ja siirtymällä Työkalut-välilehdelle.



2. Kytke laitteesi tietokoneeseen ja lataa tietosi diasend[®]-pilvipalveluun.



3. Kun tiedot ovat pilvipalvelussa, ne päivittyvät automaattisesti pistekorttiisi ja raportteihisi mobiilisovelluksessa.