

KUINKA ALOITTA GLOOKON KÄYTTÖ JA TIETOJEN LATAAMINEN



LUO TILI VERKOSSA

Voit luoda Glooko®-tilisi verkossa osoitteessa join.glooko.com.


Luo tili syöttämällä nimesi, sähköpostiosoitteesi, syntymäaikasi, maasi ja puhelinnumerosi (valinnainen).

Luo sen jälkeen profiilisi valitsemalla diabetestyyppiä, diagnoosista kulunut aika ja tämänhetkinen hoitomenetelmä/-menetelmät.

HUOM: Alaikäisiltä tarvitaan vanhemman suostumus.

Kun rekisteröinti on valmis, siirry verkkoselaimellasi osoitteeseen my.glooko.com siirtyäksesi tilillesi.

Jos saat hoitavalta taholtasi kutsun sähköpostitse, sinulle on jo luotu tili. Napsauta **Aktivoi tili** -painiketta sähköpostiviestistä ja noudata näytölle tulevia ohjeita ottaaksesi tilisi käyttöön.

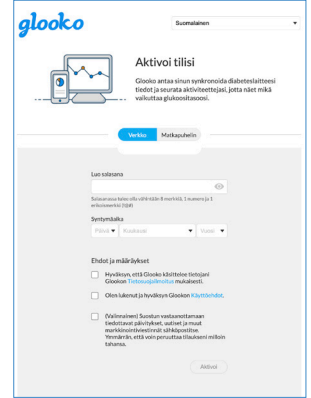

TILIN LUOMINEN GLOOKO®-MOBIILISOVELLUKSELLE

Glooko®-mobiilisovelluksen käyttöönotto sisältää samat vaiheet kuin tilin luominen tietokoneella.



TIETOJEN JAKAMINEN


Voit jakaa tietoja lisäämällä vastaanottosi ProConnect-koodin. Koodi on vastaanottokohtainen ja sen avulla voit lähettää heille tietoja.

ProConnect-koodi lisätään **Asetukset-sivulla Tili-välilehdellä**.

Oman vastaanoton ProConnect-koodi: _____ →

Potilaana voit jakaa potilastietojasi useille eri vastaanotoille. Vastaanoton ProConnect-koodi on mahdollista syöttää myös mobiilisovelluksella.

Jos sait kutsun hoitavalta taholtasi sähköpostitse, vastaanoton ProConnect-koodi on valmiiksi syötetty.

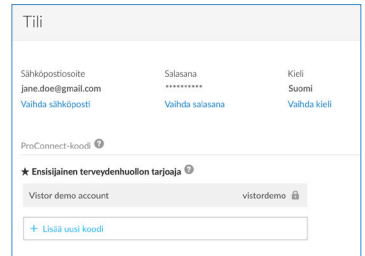


TIETOJEN KATSELEMINEN

Katsellaksesi tietoja kirjaudu sisään osoitteessa my.glooko.com matkapuhelimella tai tietokoneella.

TIETOJEN LATAAMINEN

LAITTEIDEN YHDISTÄMINEN ÄLYPUHELIMELLA


1. Voit asentaa glukoosimittarisi siirtymällä **Synkronointivalikkoon** (etusivun oikeassa yläkulmassa)
2. Napauta kohtaa **Uusi laite** (iOS) tai **Lisää laite** (Android)
3. Valitse oikea laite (BGLucose Meters tai Continuous Glucose Monitor, Smart Pens -älykynät, Yhdistetyt sovellukset tai Fitness- ja terveyslaitteet)
4. Valitse mittarisi listasta ja napauta **Valmis**.

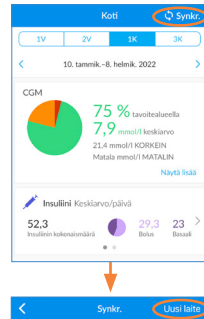

LAITTEEN LATAAMINEN MOBIILISOVELLUKSESSA


1. Napauta etusivulla kohtaa **Synkronoi**.
2. Valitse laitteesi ja noudata näytön ohjeita synkronoidaksesi laitteesi ja ladataksesi tietosi.

Glooko®-mobiilisovellus ilmoittaa sinulle ja neuvoo, jos tiedot on ladattava muulla tavoin.

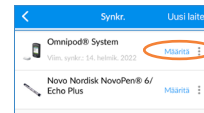

SOVELLUSTEN YHDISTÄMINEN TIETOKONEELLA




1. Voit luoda yhteyden ulkoisiin sovelluksiin siirtymällä **Glooko®-tilisi Asetukset -sivulle**.

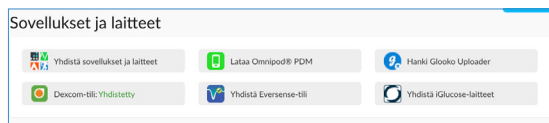

2. Siirry **Asetukset-sivulla Sovellukset ja laitteet -välilehdelle** voit yhdistää diabetes- ja terveyssovelluksia.
3. Valitse oikea sovellus ja jatka valitun sovelluksen kirjautumistiedoilla luodaksesi yhteyden.

GLOOKO® UPLOADER

1. Napsauta kohtaa **Hanki Glooko® Uploader Sovellukset ja laitteet -välilehdellä Glooko®-tilisi Asetukset-sivulla.**
2. Lataa sovellus Mac/PC-tietokoneelle ja noudata asennusohjeita.
- 3a. Käynnistä Glooko Uploader® kaksoisnapsauttamalla kuvaketta tietokoneellasi.
- b. Kirjautu Glooko®-tilillesi.
- c. Kun olet liittänyt kaapelin tietokoneeseen, liitä diabeteslaite kaapeliin. Glooko Uploader® etsii laitteen automaattisesti.
- d. Aloita sen jälkeen tietojen lataaminen Glooko®-sovellukseen.
- e. Latauksen ollessa valmis Glooko® Uploader ilmoittaa siitä.

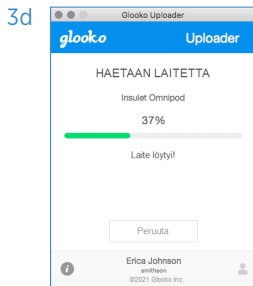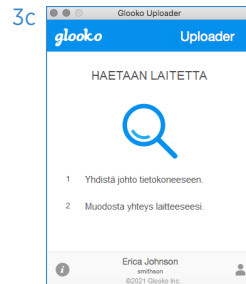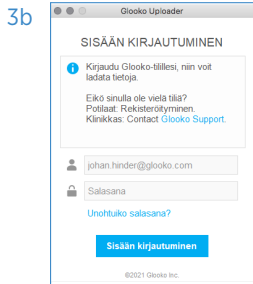

Löydät lisää resursseja osoitteesta support.glooko.com



Glooko Inc.
411 High Street
Palo Alto, CA 94041
United States



Glooko AB
Nelleckevägen 20
SE 412 63 Göteborg
Sweden

glooko®
BETTER TOGETHER