



Health Care
Doctor
Hospital
Pharmacist
Nurse
Dentist
First Aid
Surgeon
Emergency

LAITTEIDEN MÄÄRIT- TÄMINEN GLOOKO® - SOVELLUK- SESSA

Ladattaessa laitteen tietoja Glooko®-sovelluksessa, vastaanotolla **ladattu laite on liitettävä potilaan tiliin ennen tietojen katselua**. Jos laitetta ei ole liitetty tiliin, sen tiedot poistetaan 24 tunnin kuluttua lataamisesta.

Jos potilas kuitenkin lataa tietoja kotoa aktivoitulle tilille, tiedot näkyvät potilaan tilillä vastaanotolla ilman lisätoimia.

Laitteiden määrittäminen Glooko®-sovelluksessa

- 1 Napsauta välilehteä **Määritä laitteet** nähdäksesi luettelon kaikista viimeisten 24 tunnin aikana ladatuista laitteista.


Täällä voit tehdä hakuja **Lähetinlaitteen sarjanumeron** tai **Laitetyypin** (CGM, Mittari tai Pumpu) perusteella.

- 2 Katsele kaikkia potilaan tilille määrittämistä odottavia laitteita **Määritä laitteet** -välilehdellä. Glooko yrittää yhdistää nämä laitteet potilaaseen laitteen sarjanumeron perusteella. Aiemmin vastaanotolla ladatut laitteet ilmestyvät näkyviin ehdotetun potilaan kohdalle.

The screenshot shows the Glooko interface for device management. At the top, there is a search bar with the text 'Anna potilaan nimi'. Below the search bar, there are tabs for 'Määritä laitteet' and 'Näytä potilaat'. The 'Määritä laitteet' tab is active. Below the tabs, there are filters for 'Päätö' (Suodatus: S19030214) and 'Laitteen tyyppi' (CGM, Mittari, Pumpu...). A table lists devices with columns for 'Laitteen tyyppi', 'Viimeinen synkronointi', and 'Määrittäminen'. The first row shows 'Määrittäminen poistettu' circled in blue. Below the table, there is a link for 'Viimeisimmät määrittäykset'.

Laitteen tyyppi	Viimeinen synkronointi	Määrittäminen
Määrittäminen poistettu		
Wavesense Jazz Mittari CUHC078K311424	14:43 519030214	Määritä kohteelle Matthew Smith Määritä toiselle potilaalle
Novopen Insuliinikynä AAEH4X	14:42 519030214	Määritä kohteelle Matthew Smith (NovoPen) Vahvista DOB Määritä toiselle potilaalle
Ascensia Contour Next One Mittari 7602-1116163	14:41 519030214	Määritä kohteelle Joe Blogs Vahvista DOB Määritä toiselle potilaalle

- 3 Etsi laite, jonka haluat määrittää. Yleisimmät tilanteet:

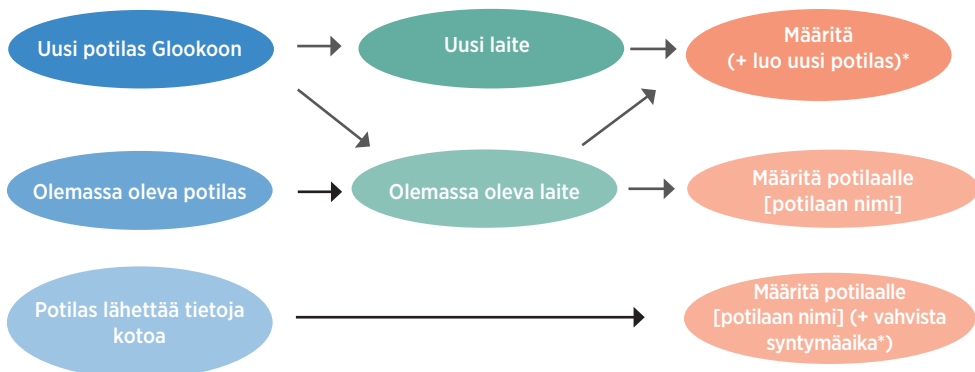


*jos kyseessä on ensimmäinen kerta, kun potilas lataa vastaanotolla

Hae tai luo potilastilejä Glooko®-sovelluksessa

- 1 Jos vastaavuutta ei löydy:** Laite merkitään Uudeksi laitteeksi ja voit **Määrittää** sen. Kun olet napsauttanut **Määritä**, sinua ohjeistetaan etsimään olemassa oleva potilastili tai luomaan uusi potilastili.
- 2 Jos vastaavuus löytyy:** Sinulla on mahdollisuus **Määrittää potilaalle [Potilaan nimi]**. Napsauttamalla kohtaa **Määritä potilaalle [Potilaan nimi]** tiedot liitetään potilaan tilille ilman lisätoimia.

Jos sen sijaan haluat vaihtaa laitteelle määritetyn potilaan, napsauta kohtaa **Määritä toiselle potilaalle**, ja sinua ohjeistetaan etsimään olemassa oleva potilastili tai luomaan uusi potilastili.

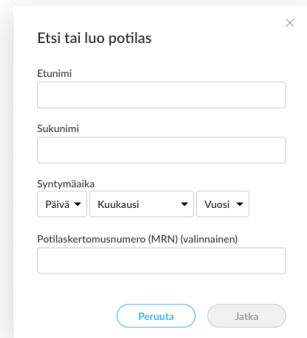

- 3** Kun laite on määritetty, se siirtyy kohdasta **Ei määritetty** kohtaan **Viimeisimmät määrietykset** ja voit sen jälkeen katsella potilaan tietoja napsauttamalla potilaan nimeä. Laite näkyy kohdassa **“Viimeisimmät määrietykset”** 24 tunnin ajan, jonka jälkeen se poistetaan listalta automaattisesti ja tiedot tallennetaan tilille, jolle laite määritettiin.

Määritys poistettu			
Wavesense Jazz Mittari CUHC078K311624	14:43 S19030214	Määritä kohteelle Matthew Smith	Määritä toiselle potilaalle
Novopen Insulinikynä AAEH4X	14:42 S19030214	Määritä kohteelle Matthew Smith (NovoPen) Vahvista DOB	Määritä toiselle potilaalle
Ascensia Contour Next One Mittari 7802-1116163	14:41 S19030214	Määritä kohteelle Joe Blogs Vahvista DOB	Määritä toiselle potilaalle


Viimeisimmät määrietykset

- 4** Seuraavalla kerralla, kun potilas lataa saman laitteen, voit määrittää latauksen helposti potilaalle (Potilaan nimi).

Potilastilien aktivoiminen Glooko®-sovelluksessa


Näytä potilaat -välilehdellä on mahdollista **kutsua** olemassa olevia potilaita aktivoimaan tilinsä. Aktivoidulla Glooko®-tilillä vastaanoton on mahdollista katsella potilaan kotona lataamia tietoja.

Potilas voidaan **kutsua** tai muistuttaa (**Lähetä kutsu uudelleen**) myöhemmin näytä potilaat -välilehdellä yhdellä napsautuksella.

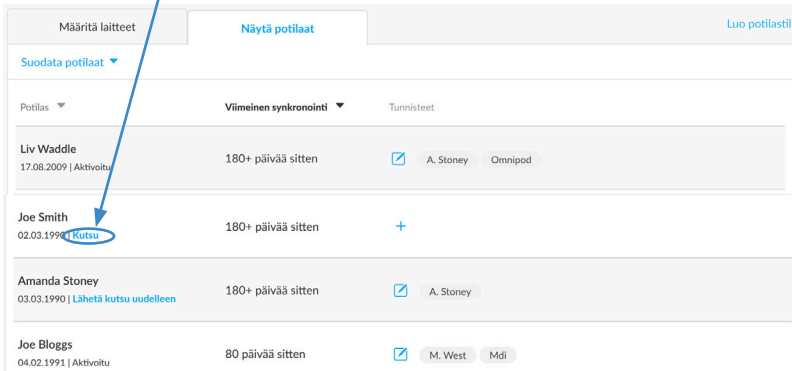

Määritä laitteen	Näytä potilaat	Luo potilastili
Suodata potilaat ▼		
Potilas ▼	Viimeinen synkronointi ▼	Tunnisteet
Liv Waddle 17.08.2009 Aktivoitu	180+ päivää sitten	<input checked="" type="checkbox"/> A. Stoney Omnipod
Joe Smith 02.03.1990 Kutsu	180+ päivää sitten	+
Amanda Stoney 03.03.1990 Lähetä kutsu uudelleen	180+ päivää sitten	<input checked="" type="checkbox"/> A. Stoney
Joe Bloggs 04.02.1991 Aktivoitu	80 päivää sitten	<input checked="" type="checkbox"/> M. West Mdi

Lisäksi potilas on mahdollista **kutsua** aktivoimaan tilinsä syöttämällä potilaan sähköpostiosoite luo potilastili lomakkeeseen tiliä luotaessa.

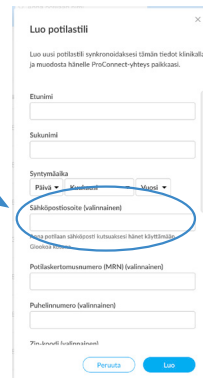

Luo uusi potilastili synkronoidaksesi tämän tietokonekallasi ja muodottaaksesi tiedot ProConnect-yhteysohjelmasta.

Etu nimi

Sukunimi

Syntymäaika
Päivä ▼ Kuukausi ▼ Vuosi ▼

Sähköpostiosoite (valinnainen)

Voit jättää sähköpostiosoite kutsuaksesi hänet käyttämään Glooko tilin.

Potilaskertomusnumero (MRN) (valinnainen)

Puhelinnumero (valinnainen)

Tin. broovelli kuukausimaksu!



Laillinen valmistaja
Glooko Inc.
411 High Street
Palo Alto, CA 94041
United States

Edustaja EU:ssa
Glooko AB
Nellickevägen 20
SE 412 63 Göteborg
Sweden

